

Panasonic®

添付文書 取扱説明書

アルカリイオン整水器 家庭用

品番 **TK8051**



このアルカリイオン整水器の
交換用カートリッジは
品番：TK7815C1です

交換方法は → 42ページ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 正しい取り付け、および正しく使用されなかった場合の製品の故障および事故について、当社は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

保証書別添付

気になる項目をすぐにチェック！

その他のよくあるご質問は

カートリッジの寿命は？
品番は？


 42 ページ

本体にお湯を通してしまったの
ですが、大丈夫でしょうか？

 58 ページ

アルカリイオン水と浄水は
どのくらい日持ちしますか？

 56 ページ

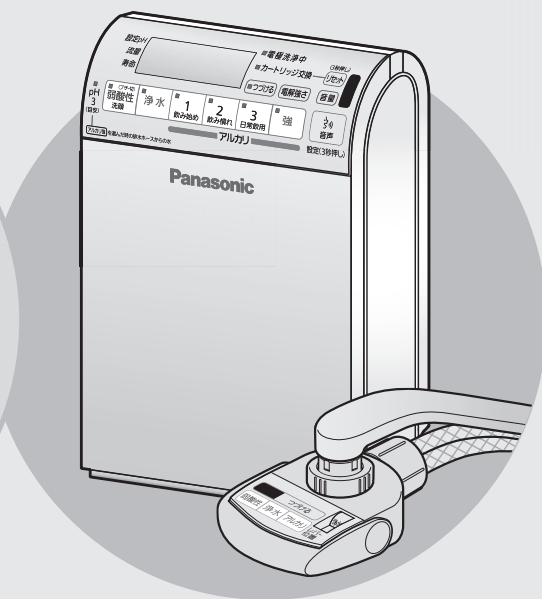

アルカリイオン水の使用目的、効能・効果 胃腸症状の改善

- 胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
- 胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

- ※腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の方は、アルカリイオン水を飲用しないでください。
- ※他に病気で気になる方は、アルカリイオン水を飲用する前に医師にご相談ください。ご相談の際は、下記2点をお伝えください。
 - カルシウム・マグネシウム・ナトリウム・カリウムなどのミネラル分が、水道水より増えていること
 - pH 9.5 程度のアルカリ性であること

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯 <http://mobile.club.panasonic.jp/>



※このサービスは
WEB 限定のサービスです。

アルカリイオン水を使うと
「水栓絞る」と表示されるのですが？

👉 31 ページ

本体洗浄や通水路洗浄を
するには？

👉 39 ページ

転居先の水栓(蛇口)の形状が
違うのですが、取り付けられ
ますか？

👉 10 ページ

蛇口から白いものが出て
くるのですが？

👉 57 ページ

最近、味が変わってきたのですが？
いやなにおいやカルキ臭がするの
ですが？

👉 52 ページ

本書では…

「アルカリイオン水」・「弱酸性水」の用語を
使用しています。
これは JIS T 2004(家庭用電解水生成器)で
示される「アルカリ性電解水」・「酸性電解水」
のことです。

もくじ

安全上のご注意	4
ご使用上のお願い.....	7
本体と付属品を確認する	8
ご使用までの流れ.....	9

はじめに

水栓(蛇口)形状を確認する	10
水切換レバーを取り付ける	13
リモコン部にリチウム電池を入れる(交換する)....	17
本体を設置する.....	18
設置後の確認をする.....	22
水質(pH)を測定する	24

取り付ける

各部のなまえとはたらき	26
使いかた(水を出す)	28
●アルカリイオン水・弱酸性水・浄水を出す	29
●原水(水道水)を出す	29
水質(pH)を調整する	36
●カルシウムを添加する	37

使う

お手入れ	38
カートリッジを交換する	42
●カートリッジの交換のしかた	44

お手入れ

停電・断水のと き.....	46
リモコンのチャンネルを設定する (2台使用の場合).....	46
本体を移設するとき.....	47

こんなときには

このような表示が出たときには	48
故障かな?と思ったときには	50
よくあるご質問(Q&A)	55

困ったとき

仕様.....	61
別売品.....	62
保証とアフターサービス	65
さくいん.....	67

必要なとき


安全上のご注意


必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

警告

電源コード・電源プラグについて



禁止

■ 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない


- ・ステープル(📌)などで固定する
- ・傷つける
- ・加工する
- ・無理に曲げる
- ・ねじる
- ・引っ張る
- ・熱器具に近づける
- ・重いものを載せる
- ・束ねる
- ・はさみ込む
- ・踏みつける など

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- 電源プラグをコンセントから抜くときはコードを持たずプラグを持って抜いてください。
- コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100 V以外での使用はしない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

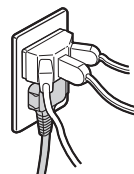

ぬれ手禁止

■ ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電の原因になります。




必ず守る

■ 電源プラグは、根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。


- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

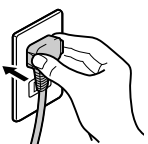

■ 電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

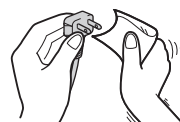

■ 本体を誤って水中に落としたときは、電源プラグをコンセントから抜き、引き上げる

感電の原因になります。

- 修理は販売店にご相談ください。

警告

分解禁止について



分解禁止

■分解したり、修理・改造しない

火災・感電の原因になります。

- 修理は販売店にご相談ください。

使用する水について



禁止

■飲用に合格した水(水道水など)以外には使用しない

殺菌能力がなく、除去できる物質(43ページ参照)以外の有害物質は除去できないため、飲むと体調を損なう原因になります。

誤飲防止について



禁止

■コイン形リチウム電池は乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むおそれがあります。

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



注意

持病や体質について



禁止

■腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の方はアルカリオン水を飲用しない 体調を損なうことがあります。



必ず守る

■次の方はアルカリオン水を飲む前に医師に相談する

- 医師の治療を受けている方
 - 持病のある方、または身体の弱っている(異常を感じている)方
 - 腎不全やカリウム排泄障害以外の腎疾患の方
- 体調を損なうことがあります。

■次の方は弱酸性水を使用する前に、医師に相談する

- 肌の弱い方
 - アレルギー体質の方
- 体調を損なうことがあります。

■初めて飲む方は、「アルカリ1(飲み始め)」から少量(コップ1~2杯)ずつを2週間程度使用し、アルカリオン水に慣れてから「アルカリ2(飲み慣れ)」、「アルカリ3(日常飲用)」を使用する

初めから強いアルカリを使用したり、多量に(コップ3杯以上)飲むと、体調を損なうことがあります。

⚠️ 注意

飲用・使用できないイオン水や用途について



禁止

■ 次のような水は飲まない

- 弱酸性水
- 排水ホースから出る水
- 水質シグナル点滅中に吐水口から出る水
体調を損なうことがあります。

■ pH10以上の水(アルカリ強)を直接飲まない

体調を損なうことがあります。

- 飲用にはpH9.5前後「アルカリ3(日常飲用)」をおすすめします。
また、1日あたりの飲用量は、0.5リットルから1リットルを目安にしてください。

■ 医薬品をアルカリイオン水で服用しない

体調を損なうことがあります。

■ アルカリイオン水や弱酸性水・浄水を魚などの飼育水に使用しない

環境が変わり、魚などが死ぬ原因になることがあります。



■ アルカリに弱いアルミ製容器や、酸に弱い銅製容器などは使用しない

容器が変色したり、傷むことがあります。

■ 指定のグリセロリン酸カルシウム製剤以外のものは入れない

体調を損なうことがあります。

- 付属品または別売品(P-A5101)をお使いください。

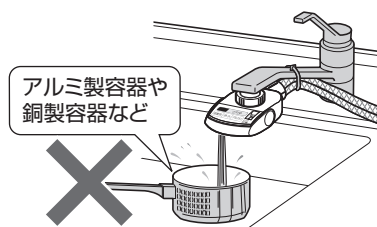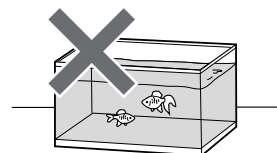

必ず守る

■ 使い始めは本体内部の溜まり水を流す

毎日の
使い始めは 約0.6リットル(約18秒間)
通水後に使用する

2日以上使用
しないときは 約8リットル(約4分間)
通水後に使用する

体調を損なうことがあります。

熱水について



禁止

■ 本体側に60℃以上の熱水を通さない

やけどの原因になることがあります。

イオン水・浄水の保存について



必ず守る

■ アルカリイオン水や浄水をくみ置きする場合は、清潔な密閉容器に入れて、常温で1日以内、冷蔵庫に保存して2日以内に使う

殺菌剤(カルキなど)が除去されているため、水が変質し、体調を損なうことがあります。

注意

異常を感じたときには



必ず守る

■アルカリイオン水を飲用して身体に異常を感じたとき、または飲用し続けても症状が改善が見られない場合は、使用を中止し、医師に相談する
体調を損なうことがあります。

■弱酸性水を使用して、肌に異常を感じたときは、使用を中止し、医師に相談する
体調を損なうことがあります。

誤飲防止について



禁止

■付属品は乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むおそれがあります。

●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

電池の取り扱いについて



禁止

■コイン形リチウム電池を火の中に入れてたり、加熱したりしない

破裂して事故の原因になります。

ご使用上のお願い

■次のような水は通水しないでください。
(カートリッジの寿命が短くなる原因)

・濁りのひどい水 ・赤サビの多い水

■本体を倒した状態で使用しないでください。
(故障の原因)

■アルカリイオン水または弱酸性水を、連続して15分以上使用しないでください。

15分以上使用すると、液晶表示に「U27」(48ページ参照)を表示し、電気分解を中止します。

■海水などの塩分を含んだ井戸水(海岸近くの井戸水)は、通水しないでください。
(故障の原因)

■地域・水質によっては、指定のpHが得られないことがあります。特に地下水を水源とした地域では、設置前に酸度測定試薬(品番:PJW-T8667)による酸度の測定を販売店にご相談ください。


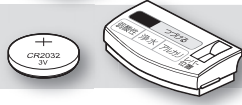
■水質の*硬度が高い地域で使用するときは…



・毎日1回、使用する前に約1分間、弱酸性水を通水してください。
(吐水口や通路にカルシウムが付着し、水の出が悪くなるため)

※硬度が高い地域では、石けんの泡立ちが悪かったり、やかんや鍋などに白いもの(カルシウム)が付着します。

ご使用までの流れ


- 1** 水栓(蛇口)形状を確認する P.10

- 2** 水切換レバーを取り付ける P.13~16

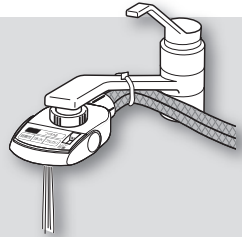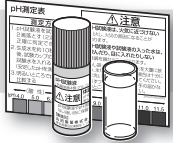- 3** リモコン部にリチウム電池を入れる P.17

- 4** 本体を設置し、電源プラグを差し込む P.18~21
- 5** 水漏れがないか、また吐水口および排水ホースから水が出ているか確認する P.22~23

本体内の空気抜きのため
約3~4分間アルカリイオン水を通水する P.29
●水質シグナルが約20秒間点滅します。

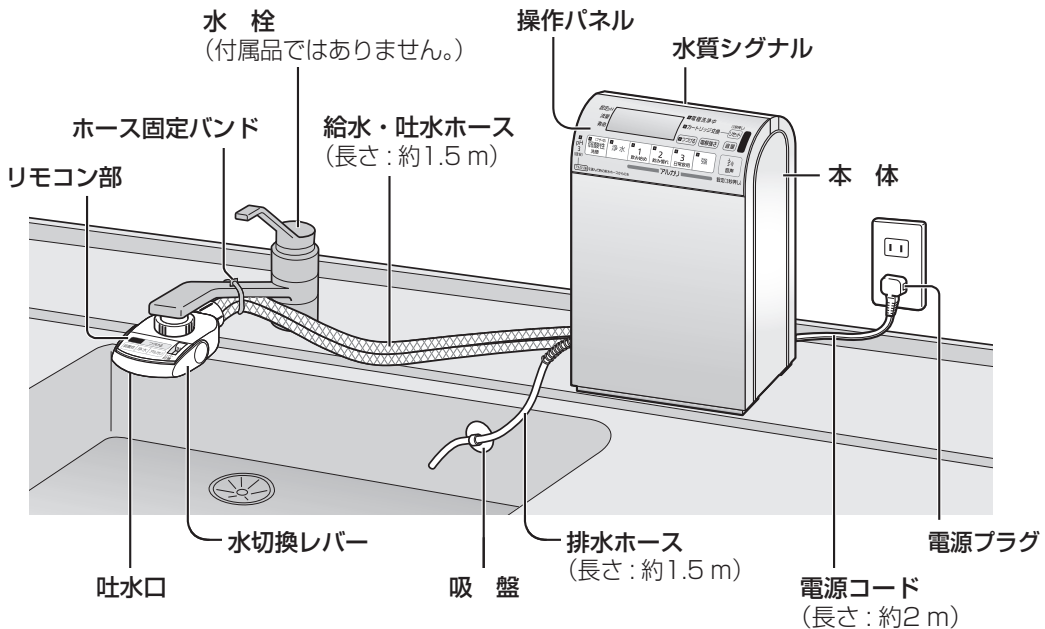- 6** 水質(pH)を測定する P.24~25

- 7** 使う 各部のなまえとはたらき・水を出す P.26~35

取り付け完成イメージ

●お湯専用の水栓には取り付けないでください。




1 水栓(蛇口)形状を確認する

水切換レバーを取り付ける前に、ご使用の水栓を確認してください。


水栓先端をねじってください。

ねじ式になっている

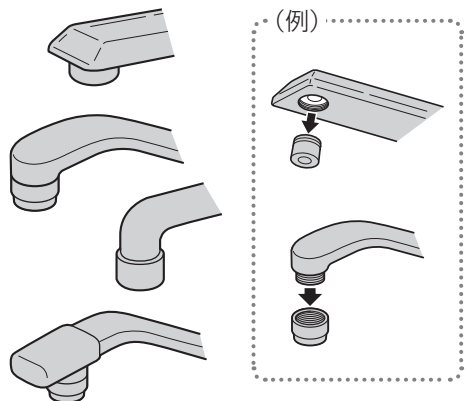


ねじが...


内側にある

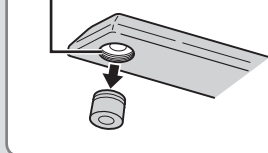

外側にある

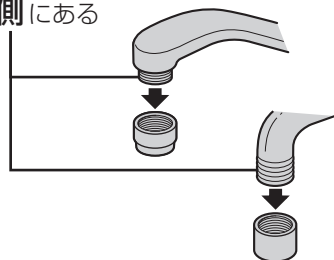

ねじ式になっていない

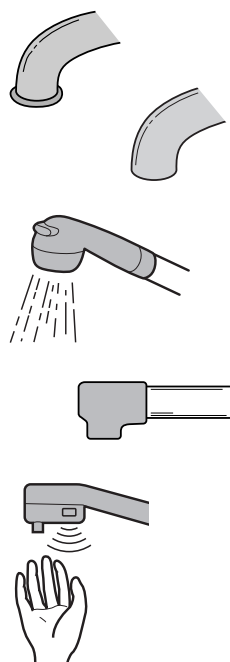

水栓先端が...

ふくらんでいる



ふくらんでいない
(ストレート型)



パイプ外径が...

16 mm・19 mm以外


16 mm・19 mm

ストレート部分が...

11 mm以上

10 mm以下

一体型

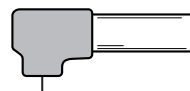

取りはずせない
(ねじ式でない)

シャワーノズル付



センサー付



など


 : 別売品と販売店または工事に依頼が必要

 : 別売品が必要

 : 付属品を使用

別売の泡沫水栓用つぎて(内ねじ用)は3種類です。ご使用の水栓に付属している部品のねじサイズを確認して、つぎてを選んでください。

- ねじサイズがわからない場合は、ご使用の水栓のメーカー名と水栓品番をご確認のうえ、販売店にご相談ください。

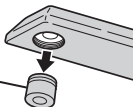


別売の泡沫水栓用つぎて(内ねじ用)を使用して取り付けできます。



別売の泡沫水栓用つぎて(内ねじ用) (P.62)
ねじサイズ 品番
●W23, 山20 …… PRV-D8623K
●W24, 山20 …… PRV-D8623M
●M24, ピッチ1 mm … PRV-D8623G

ねじ外径が…

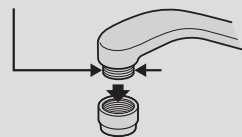

22 mm

22 mm 以外

14 ページへ

付属の固定具を使用した取り付け

12 ページへ

分岐水栓と吐水スタンド(別売品)を使用した取り付けを、販売店または工事店にご相談ください。※

ストレート部分が…



10 mm 以下

11 mm 以上

先端外径が…



13 mm ~ 24 mm 未満

24 mm ~ 32 mm

16 ページへ

付属の固定具を使用した取り付け

別売の大型水栓用金具を使用して取り付けできます。

品番 : P-06JR (内径32.5 mm) (P.62)



13 ページへ

付属の固定具を使用した取り付け

先端外径が…



13 mm ~ 24 mm 未満

24 mm ~ 32 mm

16 ページへ

付属の固定具を使用した取り付け

別売の大型水栓用金具を使用して取り付けできます。

品番 : P-06JR (内径32.5 mm) (P.62)



12 ページへ

分岐水栓と吐水スタンド(別売品)を使用した取り付けを、販売店または工事店にご相談ください。※

※水栓によっては分岐水栓が取り付けできないものがあります。

メモ

- 水栓先端のねじ部がプラスチック製のものは水漏れする場合があります。
- 分岐水栓はお客様ご自身の取り付けはできません。必ず販売店または工事店にご相談ください。

水栓(蛇口)形状を確認する


1 水栓(蛇口)形状を確認する(つづき)

分岐水栓と吐水スタンド(別売品)を使用した取り付けについて

別売の吐水スタンドと分岐水栓を使って接続するときは、水切換レバーは使用しません。

下記の内容をご確認のうえ、販売店または工事店に設置工事を依頼してください。

〈取り付け完成イメージ〉


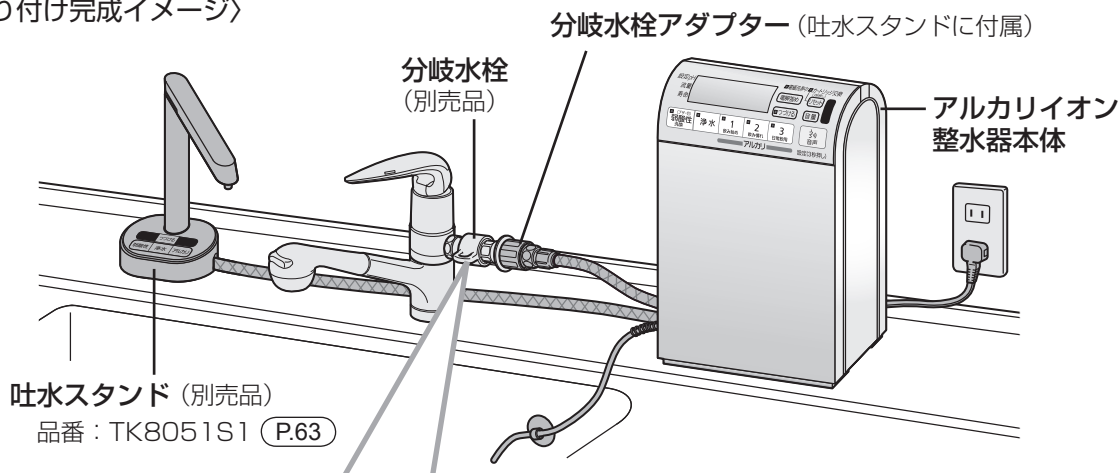


〈食器洗い乾燥機などと併用の場合〉

すでに給水仕様の食器洗い乾燥機を分岐水栓で設置されていて、同時にアルカリイオン整水器を分岐水栓側に取り付ける場合は、別売の**2分岐コック**を使用して取り付けることができます。

この場合、分岐水栓工事は必要ありませんが、取付方法については、販売店または工事店にご相談ください。


- 水栓や分岐水栓の形状によっては、一部 2分岐コックが取り付けできないものがあります。
- 食器洗い乾燥機の運転中に給水ホースを触り、温かい場合は分岐水栓が給湯仕様になっている可能性があります。給水仕様への変更を販売店または工事店にご相談ください。

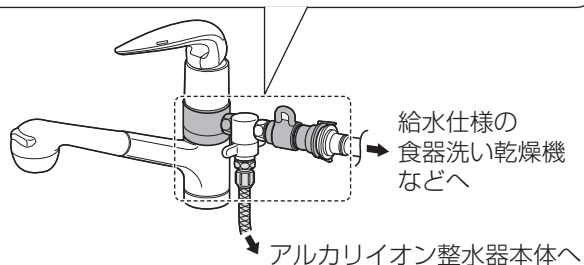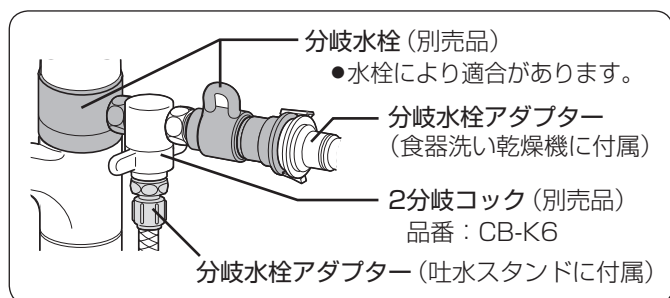

〈その他の場合〉

- 分岐水栓が取り付けられない水栓の場合は、別売の給水コンセントを使用した取り付けができます。
- 給水コンセントへは2分岐コックの取り付けはおすすめできません。(キッチンカウンターからの高さの確保ができないため)

〔給水コンセントを使用したときの取り付け完成イメージ〕

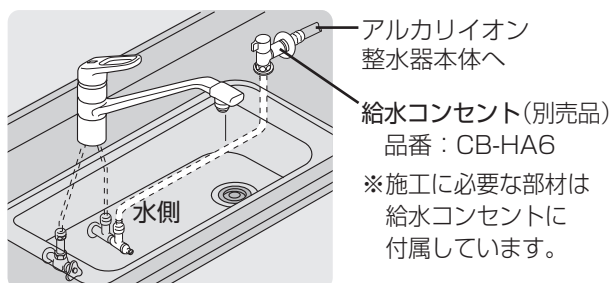

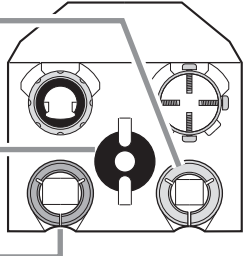




パナソニックのホームページ <http://panasonic.jp/bunki/> で、分岐水栓ガイドをご覧ください。(2010年6月現在)

2 水切換レバーを取り付ける


先がふくらんでいる水栓(パイプ外径16 mm・19 mm)への取り付け

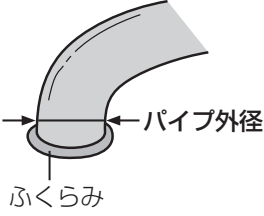お願い ●使わない部品は、捨てずに保管しておいてください。(転居や水栓取替え時のために)

蛇口の形状	使用する固定具	固定具の収納場所
 <p>外径16 mm</p>	取付リング (小・白) 	固定具セット 
 <p>外径19 mm</p>	取付リング (大・ベージュ) 	


水切換レバーを取り付ける

1 水切換レバーからつぎとパッキンをはずす

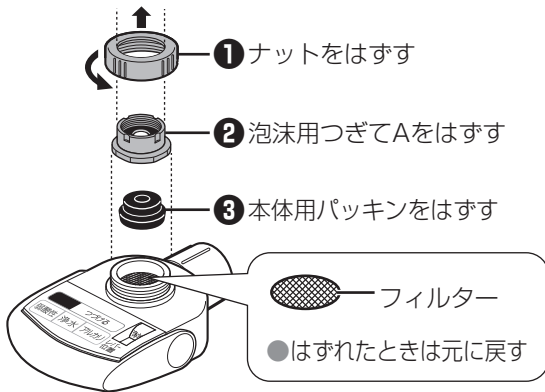


メモ ●泡沫用つぎてA・本体用パッキンは、使いませんが、捨てずに保管しておいてください。

2 取付リング用パッキンを入れる

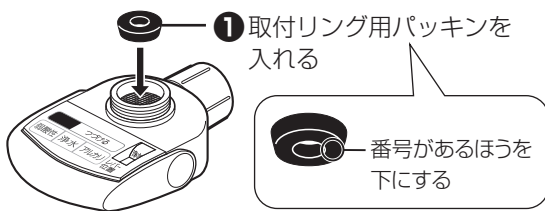

3 蛇口にナットを通して、取付リングを蛇口に取り付ける

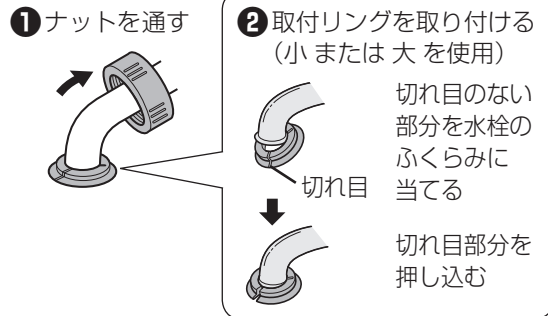

メモ ●取付リングがうまく付かない場合、水が漏れる場合、付属の取付金具で取り付けてください。(P.16)

4 水切換レバーを蛇口にあて、ナットを軽く仮締めする

●ホース取り付け後、本締めします。(P.21)

お願い ●締め付けは工具を使わないでください。工具はナット破損の原因になります。

メモ ●うまく取り付けできないときは、ご使用の水栓を再度確認してください。(P.10)

次の手順 リモコン部にリチウム電池を入れる 17ページへ



パナソニックのホームページ <http://panasonic.jp/alkaline/toritsuke/> で、取り付けを実演した動画をご覧ください。(2010年6月現在)

② 水切換レバーを取り付ける


外側にねじのある水栓(ねじ外径22 mm)への取り付け

お願い ●使わない部品は、捨てずに保管しておいてください。(転居や水栓取替え時のために)


蛇口の形状	使用する固定具	固定具の収納場所
<p>ねじ外径 22 mm</p> <p>ねじ</p> <p>ねじ部分が6 mm以上</p>	<p>泡沫用パッキン付</p> <p>W 22・山 20</p> <p>ミゾ4つ</p> <p>泡沫用つぎてA グレー色</p> <p>いずれか一方を使用 (手順3で選択)</p> <p>泡沫用つぎてB 白色</p> <p>泡沫用パッキン付</p> <p>M22・ピッチ1 mm</p> <p>ミゾ8つ</p>	<p>水切換レバーに装着済み</p> <p>固定具セット</p>

水切換レバーを取り付ける

1 蛇口の泡沫金具を回して取りはずす

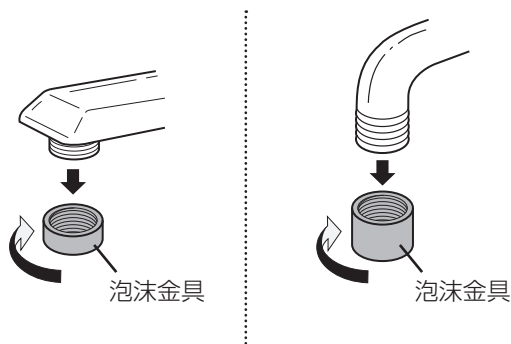

2 水切換レバーからナットをはずす

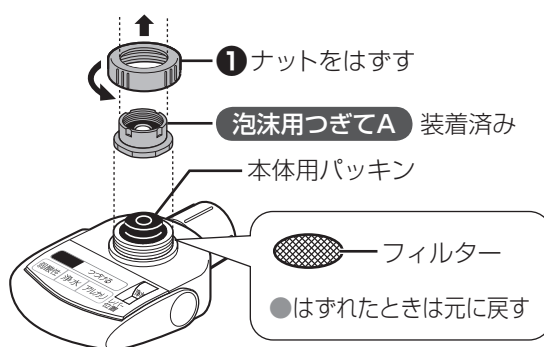


3 使用する泡沫用つぎてを選択する

- ① 泡沫用パッキン
をはずす



泡沫用つぎてA 泡沫用つぎてB


- ② 泡沫用つぎてA・Bをそれぞれ軽くまわし、
蛇口のねじに取り付けてみる

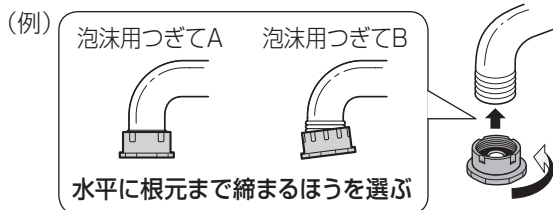

- お願い** ●はずした泡沫用パッキンは、元に戻してください。

4 蛇口にナットと選択したつぎてを取り付ける


- 下図では泡沫用つぎてAのイラストですが、
泡沫用つぎてBの場合も同じ方法で取り付け
てください。

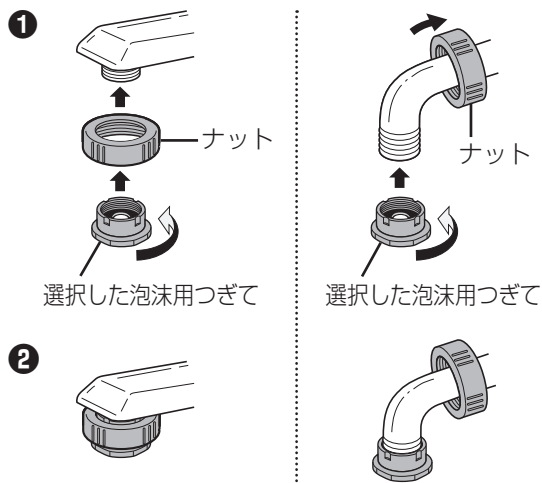

- お願い** ●工具を使わずに、手でしっかり締め付けて
ください。
工具の使用は破損の原因になります。


5 水切換レバーを 蛇口にあて、軽く仮締めする

- ホース取り付け後、本締めします。(P.21)

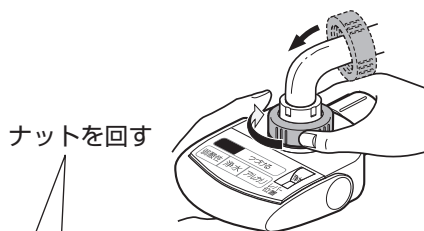

回しにくいとき

水切換レバーごと
回す

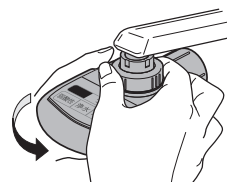

- お願い** ●締め付けは工具を使わないでください。
工具はナット破損の原因になります。

- メモ** ●うまく取り付けできないときは、ご使用の
水栓を再度確認してください。(P.10)

次の手順

リモコン部に
リチウム電池を入れる


17ページへ

本締め (P.21) 後に泡沫用つぎてから 水が漏れる場合の処置方法


- 取り付けに使用しないつぎてに入っている
泡沫用パッキンを抜き取って、
使用するつぎてに足し、2枚重ねにする。

- ① パッキンを
抜き取る

- ② 抜き取った
パッキンを使い
2枚重ねにする

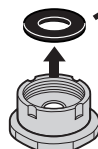

取り付けに
使用しないつぎて

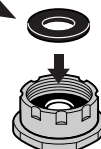

取り付けに
使用するつぎて



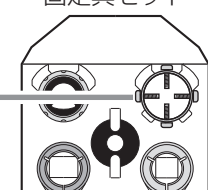
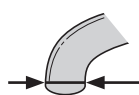


パナソニックのホームページ <http://panasonic.jp/alkaline/toritsuke/> で、取り付けを実演した
動画をご覧いただけます。(2010年6月現在)

② 水切換レバーを取り付ける


先がふくらんでいる水栓(パイプ外径16mm・19mm 以外)への取り付け
 先がふくらんでいない水栓(先端外径13mm～24mm)への取り付け

お願い ●使わない部品は、捨てずに保管しておいてください。(転居や水栓取替え時のために)

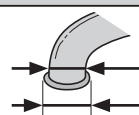蛇口の形状	使用する固定具	固定具の収納場所
蛇口の先がふくらんでいる  パイプ外径：16 mm・19 mm 以外 先端外径：13 mm～24 mm 未満	取付金具 (ねじ4本付) 	固定具セット 
蛇口の先がふくらんでいない  先端外径：13 mm～24 mm 未満		


水切換レバーを取り付ける

1 水切換レバーから 泡沫用つぎてAをはずす

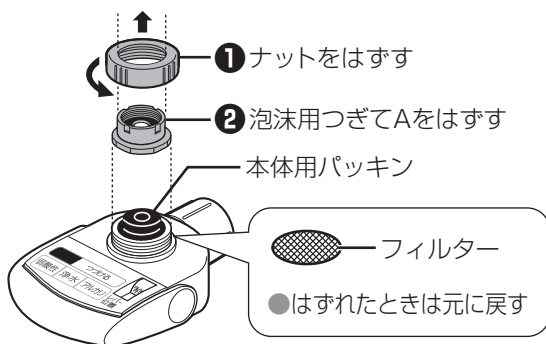

メモ ●泡沫用つぎてAは、使いませんが、捨てずに保管しておいてください。

2 取付金具のねじをはずして 泡沫用つぎてAと入れ替える

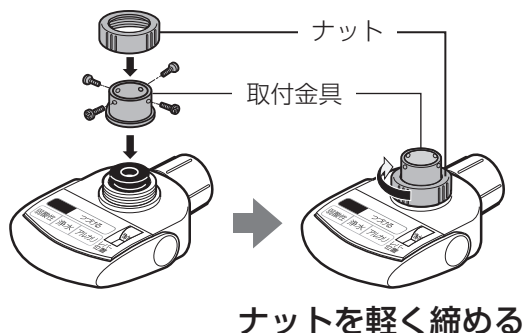

お願い ●締め付けは工具を使わないでください。工具はナット破損の原因になります。

3 取付金具に4本のねじをもどし、 締めたナットをゆるめる

- ① 軽くねじ(4本)を締める
- ② すきまが3 mm～4 mmになるまで、ナットがはずれないようにゆるめる

4 水切換レバーを水栓に押し付け ながら、ねじを ドライバーで 締める

- ① パイプが中央にくるように、奥のねじ
- ② 残りのねじ2本をドライバーで締める

5 ナットを軽く 仮締めする

- ホース取り付け後、本締めします。(P.21)

お願い ●締め付けは工具を使わないでください。工具はナット破損の原因になります。

メモ ●うまく取り付けできないときは、ご使用の水栓を再度確認してください。(P.10)

次の手順 ▶ リモコン部に
リチウム電池を入れる


17ページへ



パナソニックのホームページ <http://panasonic.jp/alkaline/toritsuke/> で、取り付けを実演した動画をご覧いただけます。(2010年6月現在)

③ リモコン部にリチウム電池を入れる (交換する)

1 水切換レバーを下げ、リモコン部を取りはずす

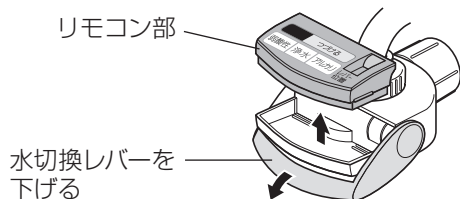


2 リモコン部の裏面の電池ケースに電池を入れる

●フタを開ける前に、しっかり水分をふき取ってください。

① フタを開ける

リモコン部 (裏面)


メタルの様なものでも左に回す (付属の電池では回さない)

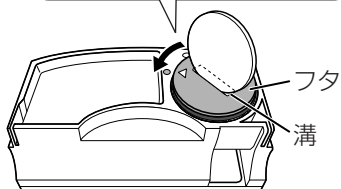

② 電池を入れる


●交換のときは、古い電池を取り出してください。

+-を正しく入れる

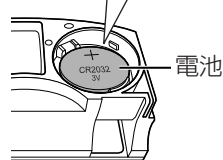

③ フタを閉める

② 右に回す

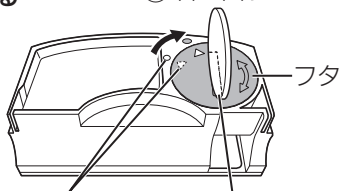

① 合わせて取り付ける


3 水質切替ボタンを押し、赤色点滅を確認する

赤外線送信部
点滅 (赤色)

水質切替ボタン



4 リモコン部を水切換レバー部にもどす

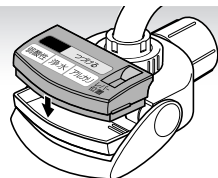

お願い ●リモコン部を水切換レバー部から取り外した状態で使用しない。紛失や水中に落ちるおそれがあります。

次の手順 本体を設置する **18** ページへ

電池の交換について

● **交換時期**

●赤外線送信部が点滅しなくなったときに電池の寿命です。

目安：約1年(1日20回操作した場合)

●付属の電池はテスト用のため、寿命が短い場合があります。

● **交換電池**

使用電池は、市販品の
コイン形リチウム電池 CR2032



お願い ● **電池の廃棄について**

使用済みのリチウム電池は、市町村の定める電池の捨てかたに従って廃棄してください。

⚠ 注意

■ **コイン形リチウム電池の+と-は正しく入れる**



+と-を間違えて入れると、破裂や液漏れによる事故の原因になることがあります。

必ず守る

■ **コイン形リチウム電池や電池ケースの内部をぬらさない**



破裂や液漏れによる事故の原因になることがあります。

水ぬれ禁止

リモコン部にリチウム電池を入れる (交換する)

4 本体を設置する

設置場所を確認する







お願い 次のような場所には設置しないでください。

- **コンロなど高温部の近く(60℃以上)**
ケースの熱変形などの原因になります。
- **直射日光があたる場所や、風雨にさらされる場所**
誤動作、故障などの原因になります。
- **凍結の可能性がある場所**
通水路、カートリッジの割れなどの原因になります。
- **油が付着しやすいところ**
ケースのひび割れなどの原因になります。
- **浴室、水・蒸気がかかるところ**
誤動作、故障などの原因になります。
- **キッチンカウンターより低い位置(足元など)**
通水路の洗浄水の排水不足などの原因になります。

本体を設置する




注意

- **本体は平らな場所に設置する**
 不安定な状態で設置すると転倒し、けがをすることがあります。
必ず守る
- **本体を壁に掛けて使用する場合は、必ず販売店または工事店に依頼する**
 ご自分で設置すると、落下して、事故の原因になることがあります。
必ず守る
- **水の出口をふさいだり、ホースを折り曲げたり、ねじったり、つぶしたりしない**
 水漏れや適切なpHの水が出なくなる原因や故障の原因になることがあります。
禁止
- **給水・吐水ホースに他の器具を接続しない**
 付属の水切換レバー以外を接続すると、水漏れや故障の原因になることがあります。
禁止
- **逆止弁(水の逆流防止弁)が付いていない給湯設備に接続しない**
 給湯設備が故障する原因になることがあります。
禁止
- **元止式湯沸器(湯の出口で止水できない構造のもの)に接続しない〔瞬間湯沸器など〕**
 湯沸器が故障する原因になることがあります。
禁止

1

平らで、安定した置き場所を選ぶ

- 水切換レバーの吐水口と排水ホース先端の高低差を20 cm以上50 cm未満確保できる場所

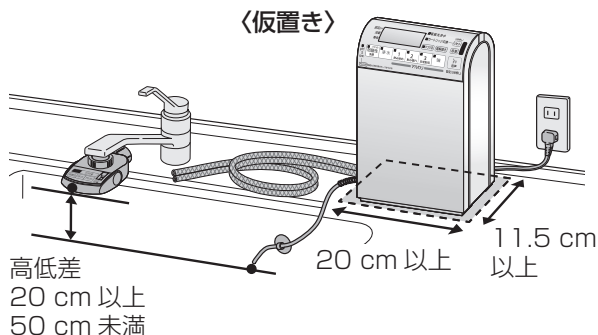


2 本体底面の電源コード・ホースを、水栓(蛇口)方向に引き出す

お願い ●通水後は本体を倒さない。
本体内に水が浸入し、故障の原因になります。


左側から引き出す場合

右側から引き出す場合

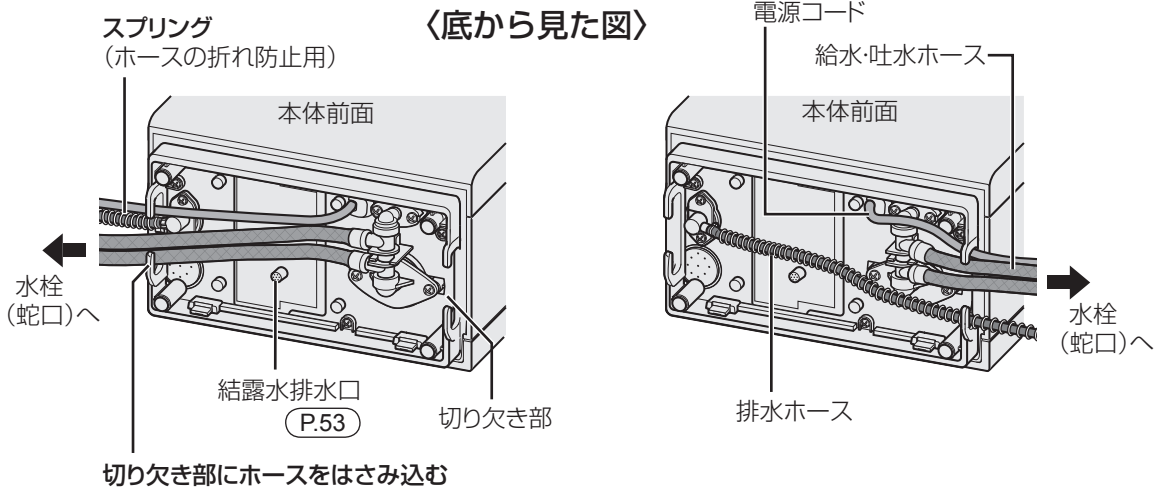

3 本体を仮置きして、リモコンが正常に動作するかを確認する

- ① 本体を設置場所に置く
- ② 電源プラグを差し込む
- ③ リモコン部の水質切替ボタンを押して、本体の水質表示ランプが連動して変わることを確認する
- ④ 動作確認後、電源プラグを抜く

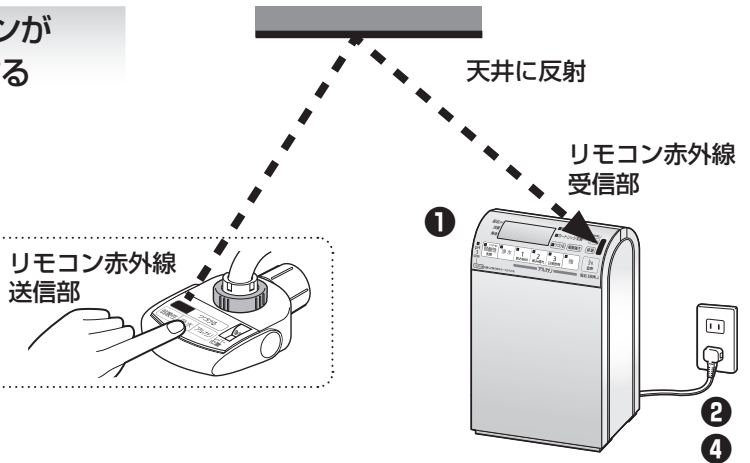

メモ ●動作しない場合は、本体の設置位置を変更してください。
(例)リモコンが動作しにくいところ

- IH調理器(炊飯器やクッキングヒーター)の近く
- インバーター式蛍光灯の真下
- 黒っぽい天井や高い天井(吹き抜けなど)の下
- 本体の真上に障害物(戸棚など)がある
- リモコン赤外線受信部に、強い光が当たる場所
- 整水器の近くでは、ラジオに雑音が入ることがあります。その場合、ラジオを本器から離してください。

お願い ●赤外線送信部は、ふきんを掛けたり、覆わないでください。
●赤外線送信部が点滅しなくなったら、電池を交換してください。
●本体を壁掛けする場合、設置工事は販売店・工事店に依頼してください。
(別売品)壁掛けセット品番：TK805009 (P.63)

4 本体を設置する(つづき)


ホースを水切換レバーにつなぐ

4 給水・吐水ホースの長さを決める


給水・吐水ホース設置のポイント

管内に水が残ると、においの原因になります。

- ホースはできるだけまっすぐに使う
- 折らない(ホースをつぶさない)
- 束ねない
- 浮かせない
- キッチンカウンターより低いところを通さない

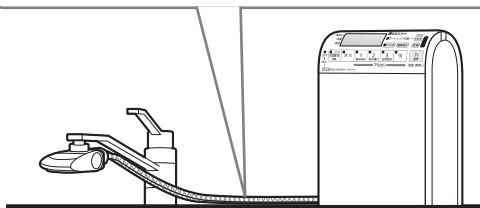


メモ

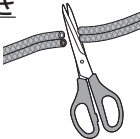
- **給水・吐水ホースが長いとき**
ホースが長い場合は、束ねないで、まっすぐにカットしてください。
- **給水・吐水ホースの長さが足りないとき**
ホース(長さ1.5 m)の長さが足りない場合は、別売品(長さ2.5 m)を使用してください。(P.62)

5 給水・吐水ホースを水切換レバーにつなぐ

- ① ホース締付ナットをはずす

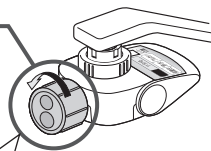


● 中にホースガイドが入っています。

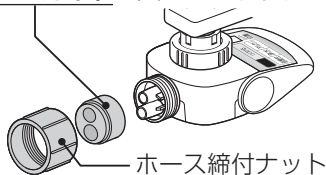

ホース締付ナット


- ② 給水・吐水ホースに、ホース締付ナットとホースガイドを通す

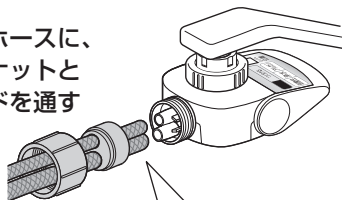


上：白(吐水側)
下：黒(給水側)

給水側と吐水側を間違えて差し込むと、圧力がかかり電解層が破損して、水漏れの原因になります。

- ③ 水切換レバーに2本のホースを奥までしっかり差し込む

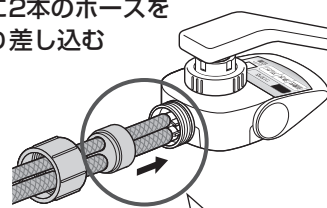


- ④ ホースガイドを押し込む

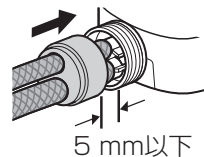

5 mm以下

- ⑤ ホース締付ナットを回し、手でしっかり締める

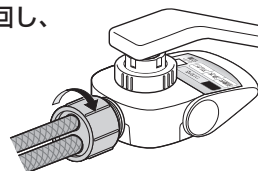


お願い ● 締め付けは工具を使わないでください。工具はナット破損の原因になります。

6 排水ホースの先端位置を決め、吸盤で固定する

排水ホース設置のポイント [適切なpH(水素イオン濃度)を得るため]

- ホースはできるだけまっすぐに使う
- 折らない(ホースをつぶさない)
- 束ねない ・ 浮かせない
- 排水ホースは適切な長さでカットする

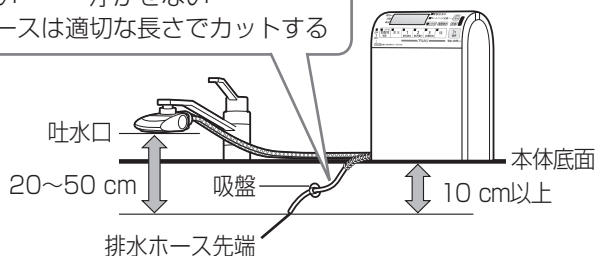

メモ


- 排水ホースの長さが足りないとき
ホース(長さ1.5 m)の長さが足りない場合は、別売品(長さ2.5 m)を使用してください。(P.62)

市販のホースを使うと故障の原因になります。

7 水切換レバーのナットを手で本締めする


- 水切換レバーを90度横向きにしてナットを手で締め、正面にねじるとしっかり締まる。

お願い • 締め付けは工具を使わないでください。
工具はナット破損の原因になります。

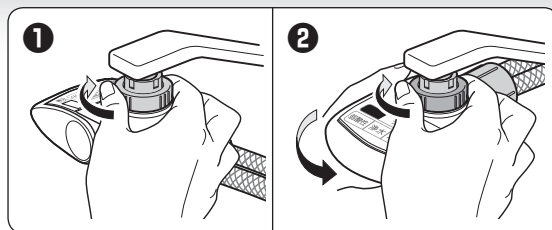

8 固定バンドでホースを固定する(水漏れ防止のため)

ホース固定バンド
(付属品)

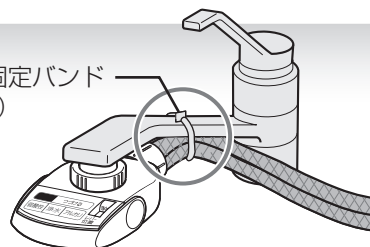


9 電源プラグを差し込む(交流100 V)

- ブザーが「ピッ」と鳴り、「浄水」の水質表示ランプが点灯します。



お願い • 通常は電源プラグを抜かないでください。
(機能動作を維持させるため)

- メモ**
- 待機時も約0.4 Wの電力を消費しています。
 - 電気代は、1ヵ月あたり約33円です。
(1日10分使用、電気料金22円/kWhで算出)

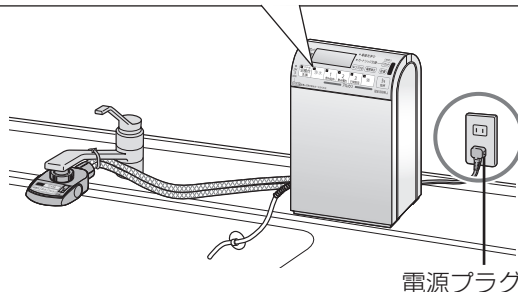

次の手順 設置後の確認をする **22** ページへ

5 設置後の確認をする

正しく設置され、動作することを、ご確認ください。


1 本体の空気抜きのため、約3~4分間アルカリイオン水を通水する

- 設置直後は、通水すると水質シグナルが約20秒間点滅します。

アルカリイオン水の出しかた (詳しくは P.29)

- ① 水切換レバーを「浄水」にする
- ② 本体またはリモコン部の水質切替ボタンで「アルカリ3」を選ぶ
- ③ 水栓(蛇口)を開け、水を出す

2 下記の項目を確認し、異常がある場合は各々の処置をする

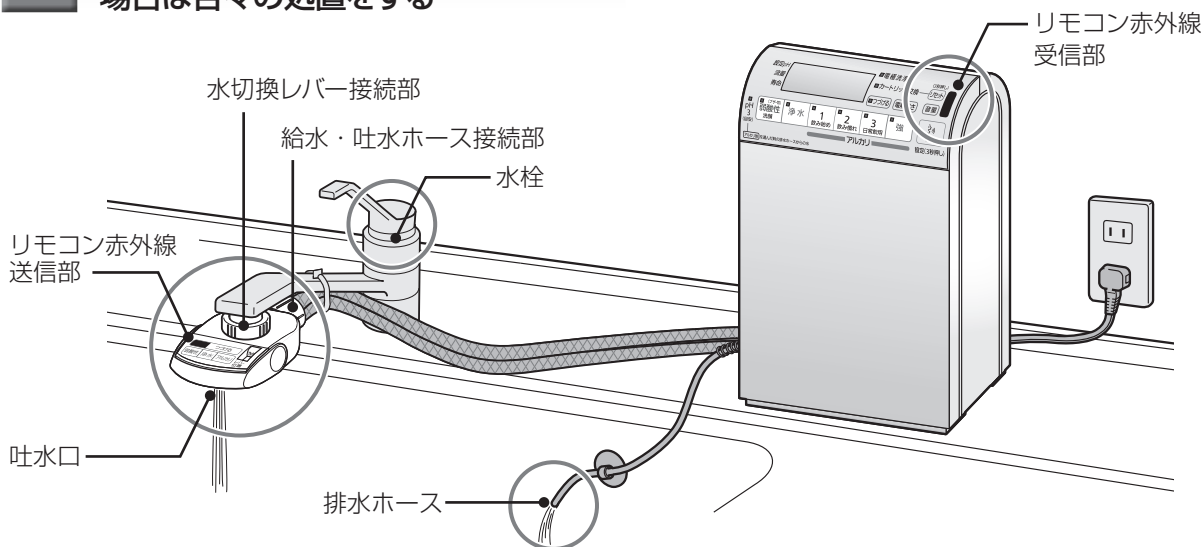


確認項目

異常時の点検個所と処置

参照ページ


吐水口から水が出ているか

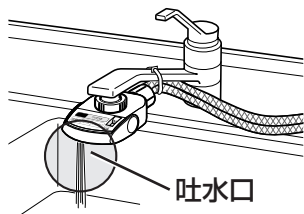

- 給水・吐水ホースが折れたり、つぶれたりしていないか
➡まっすぐにしてください。

19
~
21

アルカリイオン水を通水したとき、排水ホースから水が出ているか



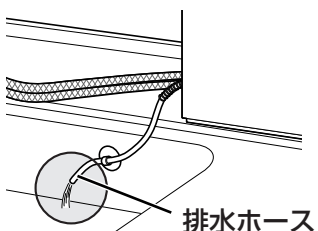


- 排水ホースが折れたり、つぶれたりしていないか
➡まっすぐにしてください。

※通水中に、排水ホースから出ている水がとぎれる場合は、吐水口と排水ホース先端の高低差を大きくしてください。

19
~
21

通水

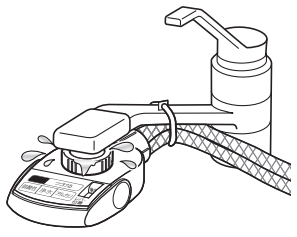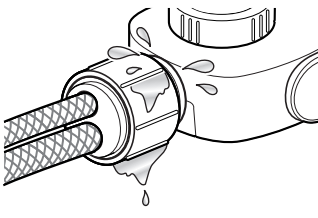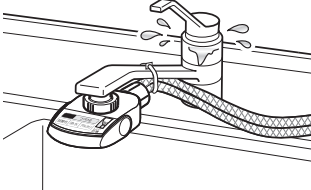確認項目	異常時の点検個所と処置	参照ページ
<p>水切換レバー接続部に水漏れがないか</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水切換レバーを水栓に確実に取り付けられているか ➡ 「水切換レバーを取り付ける」を再確認し、確実に取り付けてください。 ※ 泡沫用つぎでの締め付けが弱いときは、給水・吐水ホースをいったん取りはずし、水切換レバーごと回転させると、しっかり締め付けられます。 ● 水切換レバー内の部品は正しく入っているか ➡ 部品を正しく取り付けてください。 ● 水栓の先端(断熱キャップなど)にひび割れがないか ➡ 水道工事店にご相談ください。 	<p>13 ~ 16</p> <p>—</p>
<p>給水・吐水ホース接続部に水漏れがないか</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 給水・吐水ホースを水切換レバーに確実に取り付けられているか ➡ 奥まで差し込み、ホース締付ナットで締め付けてください。 	<p>20</p>
<p>水栓から水漏れがないか</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水栓のパッキンが古くなっていないか ➡ 水道工事店にご相談ください。 	<p>—</p>
<p>リモコン部の水質切替ボタンを押して、本体が正しく動作するか</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体のリモコン赤外線受信部がかくれているか ➡ リモコン赤外線受信部がかくれないよう、本体の向きを変えてください。 	<p>—</p>

水漏れ

リモコン

6 水質(pH)を測定する

お住まいの地域により水質は異なります。

●本器は標準の水質に設定されていますので、ご使用の原水によっては、調整が必要になる場合があります。

お願い ●設置後および、1週間以上使用しなかった場合は、必ずpHを測定し、「pHの目安」の範囲内に入っているか確認してからご使用ください。

水質(pH)について

pHとは水(水溶液)のアルカリ性・中性・酸性の程度を示すもので、**水素イオン指数**のことです。



メモ ●水道法で、水道水のpHは5.8~8.6です。

■ pHの目安について


- 本器で作ったアルカリイオン水が「pHの目安」の範囲内に入っているかをチェックします。
- 定期的にpH試験液を使って数値を確認してください。(検査頻度の目安：1カ月に1回以上)

<input type="checkbox"/> pH 3 (目安)	<input type="checkbox"/> (ブザ切) 弱酸性 洗顔	<input type="checkbox"/> 浄水	<input type="checkbox"/> 1 飲み始め	<input type="checkbox"/> 2 飲み慣れ	<input type="checkbox"/> 3 日常飲用	<input type="checkbox"/> 強	
pHの目安	2.8 ~ 3.5	5.0 ~ 6.5	電気分解 なし	8.0 ~ 9.0	8.5 ~ 9.5	9.0 ~ 10.0	9.5 ~ 10.5

■ pH試験液について

- 定期的にpHの目安を測る試験液です。
- また、pH4.0以下の酸性水は同じ色になります。
- 主成分：エタノール/メチルレッド/
プロモチモールブルー/フェノールフタレイン

(付属品または別売消耗品 (P.62))

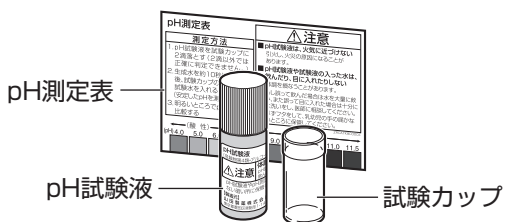

pH試験液の取り扱い

- お願い**
- 保管：日光に当てると変色するため、暗いところに保管してください。
 - 廃棄：原液を捨てる時は、水で薄めて下水に流してください。

注意

■ pH試験液は、火気に近づけない



引火し、火災の原因になることがあります。

火気禁止

■ pH試験液や試験液の入った水は、飲んだり、目に入れたりしない
(特にお子様にはご注意ください。)



体調を損なうことがあります。


禁止

- もし誤って飲んだ場合は水を多量に飲み、目に入れた場合は十分に水洗いをし、医師に相談してください。
- 必ずフタをして、乳幼児の手の届かないところに保管してください。

pH測定のかた


1 試験カップにpH試験液を2滴落とす

- 2滴以外では正確に判定できません。

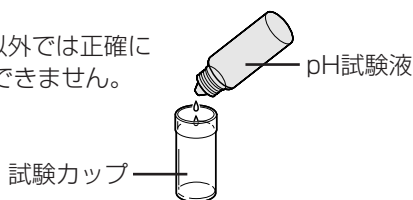

3 試験カップに、手順2で採水したアルカリイオン水を入れる


カップラインの
上下約5 mmの
範囲まで入れる

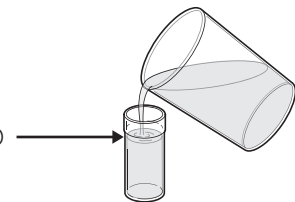

2 アルカリイオン水を10秒以上流したあと、コップに採水する


(例)

アルカリ3
(日常飲用)

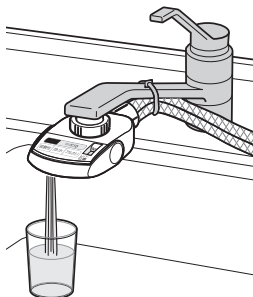


- 安定したpH値を測るため、10秒以上流したあとの水で測定します。

4 背景が白く、明るいところでpH測定表と比較する

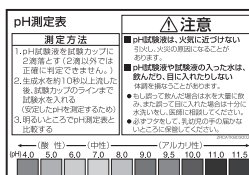

pHの目安 (P.24)

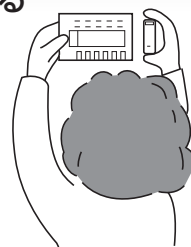

- アルカリ3(例)の場合、pH9.0~10.0の範囲であれば正常です。

- メモ**
- カートリッジが新しいとき(約1週間)は、pHがやや高くなる場合がありますが、異常ではありません。
 - 原水を測定した場合、水中の各種成分の影響により、試験水の色がpH測定表と異なる場合があります。
 - 市販のリトマス試験紙などでは正確に測定できません。

pH測定結果の異常と処置について

pH測定結果
pHの目安より
数値が低い

電解強さボタンで
「強」に設定する

(P.36)

まだ低いときは
グリセリン酸カルシウム
製剤を添加する (P.37)


pH測定結果
pHの目安より
数値が高い

電解強さボタンで「弱」に設定する (P.36)

- メモ**
- pH測定値が「pHの目安」の範囲内に入っていれば、グリセリン酸カルシウム製剤を添加する必要はありません。


7 各部のなまえとはたらき

全体図

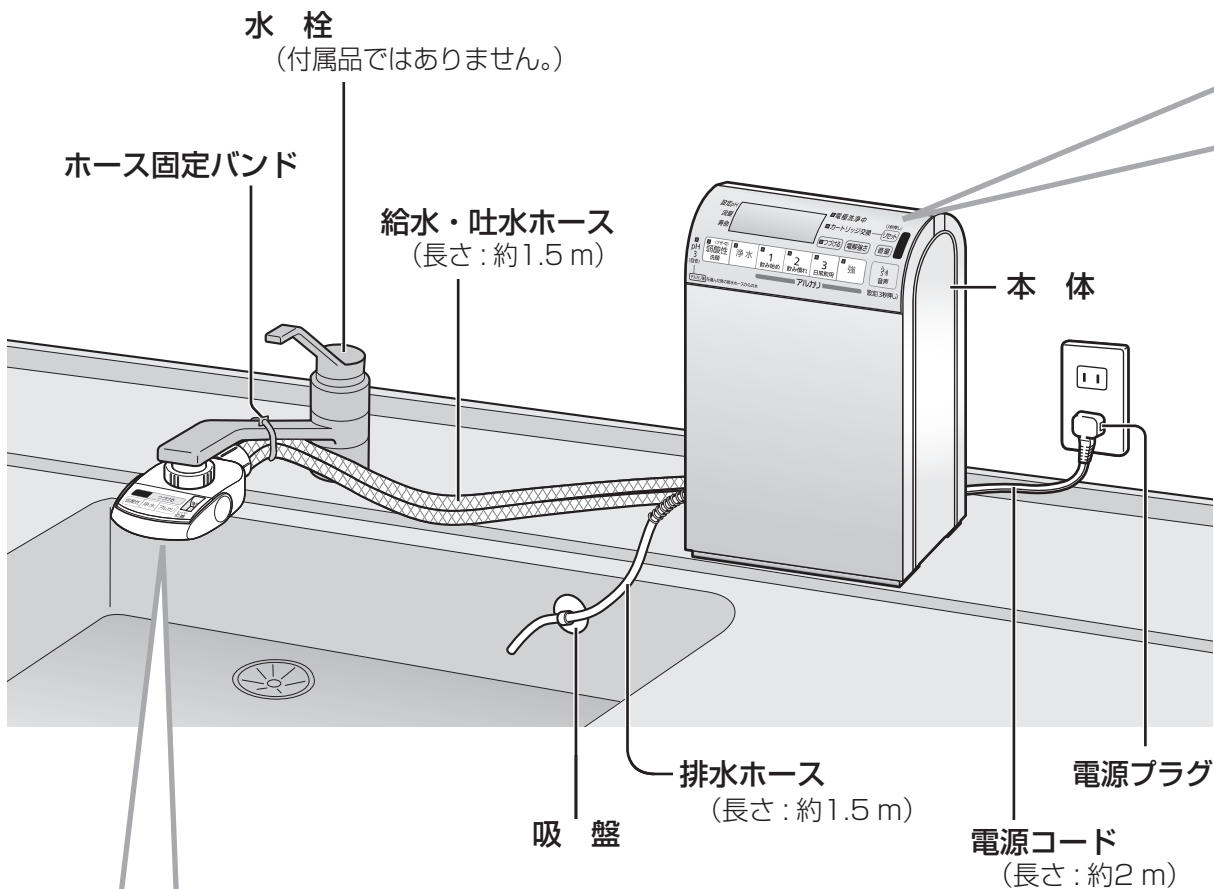

水切換レバー部

リモコン部

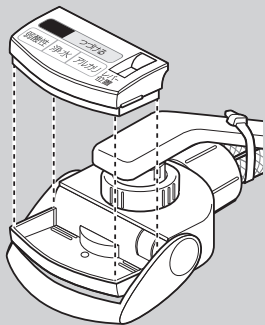

つづけるボタン


押すと、自動洗浄機能を停止し、同じ水質をくり返し使うことができます。(P.33)

リモコン赤外線送信部

操作時に点滅(赤色)します。

水質切替ボタン

水質の切り替えをします。(P.29)

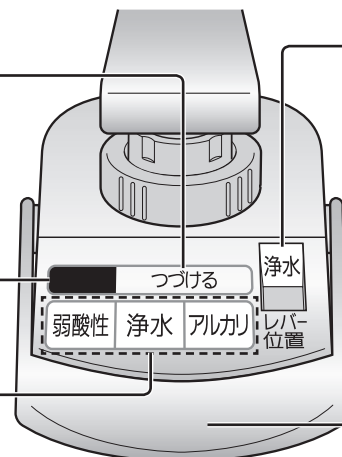

本体操作パネル

表示部(液晶表示)

下記を表示します。

- 各水質切替ボタンの設定pH (P.31)
 - カートリッジの寿命 (P.42, 43)
 - 通水の流量 (P.31)
 - 本体の異常 (P.48, 49)
- など

水質シグナル


選んだ水質を点灯する色でお知らせします。(P.30)

電極洗浄中ランプ(赤色)

自動洗浄中に点灯します。(P.35)

カートリッジ交換ランプ(赤色)

カートリッジの交換時期をお知らせします。(P.42, 43)

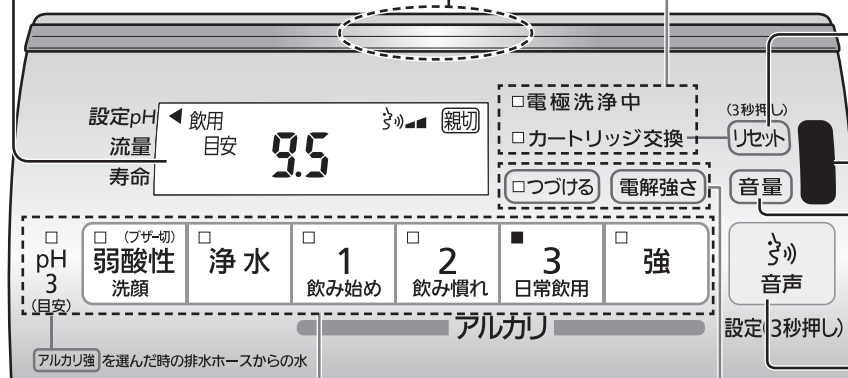

リセットボタン

カートリッジを交換した後に押します。(P.45)

リモコン赤外線受信部

音量ボタン

音声ガイドの音量を切り替えます。(P.34)

音声ボタン

音声ガイドの聞き直しや設定をします。

(P.28, 34)

水質切替ボタン

水質の切り替えをします。(P.28, 29)

水質表示ランプ

選んだ水質が点灯します。(P.28)

つづけるボタン・ランプ(黄緑色)

同じ水質をつづけて使うときに押します。(P.33)




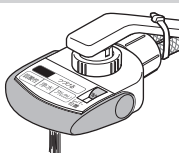
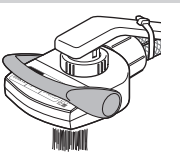
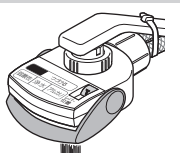
電解強さボタン

電解強さの設定をします。(P.36)

メモ

- 水質切替ボタンの下に、点字表示をしています。(P.60)

〈水切替レバー位置表示部〉 現在のレバー位置を表示します。

		
アルカリイオン水・弱酸性水・浄水	シャワー 原水(水道水)	ストレート 原水(水道水)
		

〈水切替レバー〉 水流を切り替えます。

〔下から見た図〕

原水口

(シャワー)

原水口

(ストレート)

吐水口(ストレート)

アルカリイオン水・弱酸性水・浄水が出ます。

7 使いかた(水を出す)

ご使用の前にお読みください

水質表示ランプ：29ページの手順2で選んだ水質が点灯します。

水質切替
ボタン
(本体)



用途

茶しぶとり 魚料理の あとの消臭 まな板洗い などに	肌に近い 弱酸性水で、 洗顔に	薬の服用時 ミルクの 溶き水 飲用などに	アルカリ イオン水を 初めて飲む ときに (2週間程度)	お米を炊く ときに	コーヒー 紅茶・緑茶 煮物・鍋物 汁物 などに	ゴボウや コンニャクの アク抜き 野菜ゆで (ホウレン草の おひたしなどに)
--	-----------------------	-------------------------------	--	--------------	-------------------------------------	---

飲用

×	×	○	○	○	○	×
飲めない	飲めない		飲み始めに	飲み慣れに	日常飲用に	飲めない

水質

酸性水	弱酸性水	浄水	アルカリイオン水			
ろ過された不純物の少ない水						

pH表示値

3.0	5.5	—	8.5	9.0	9.5	10.0
-----	-----	---	-----	-----	-----	------

pHの目安


2.8~3.5	5.0~6.5	電気分解は されていま せん	8.0~9.0	8.5~9.5	9.0~10.0	9.5~10.5
---------	---------	----------------------	---------	---------	----------	----------

水が出る
ところ

排水ホース (P.30)	吐水口					
-----------------	-----	--	--	--	--	--

メモ

- アルカリイオン水のpHが高くなるほど、ご飯がやわらかめになります。お好みにあわせて、水量やアルカリレベルを調整してください。(おすすめ：pH9.0以下)
- 1日あたりの飲用量は、「アルカリ3」で0.5リットルから1リットルを目安にしてください。
- pH(水素イオン濃度)とは
水(水溶液)のアルカリ性・中性・酸性の程度を示すもので、水素イオン指数のことです。

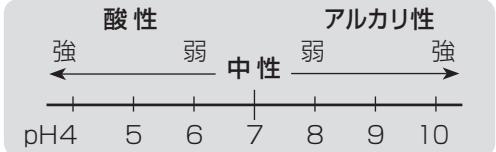


音声ガイドについて

ボタン操作の内容や本体の異常などを、音声でお知らせします。

例) [3 日常飲用] を押す

アルカリ3です

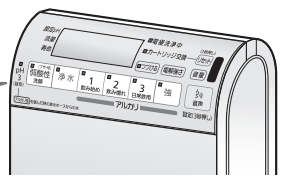

メモ

- [音声] を押すと、音声ガイドをもう一度聞くことができます。
- 音声ガイドの設定や音量は変更できます。(P.34)

使いかた(水を出す)


アルカリイオン水・弱酸性水・浄水を出す

35℃未満の水温で使用してください。(カートリッジおよび本体の故障の原因になります。)

●誤って35℃以上の水を使用したときは、本体に水を通してください。(P.58)「Q21」)


1 水切換レバーを動かし、「浄水」にする

水切換レバー

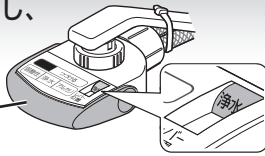


2 本体またはリモコン部で 使いたい水質切替ボタンを押す

- リモコン部でアルカリを選ぶときは、**アルカリ**を押すごとに下記のように切り替わります。

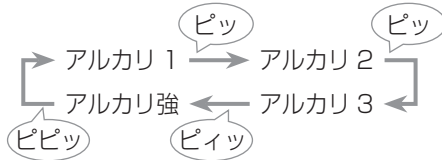

本体


リモコン部

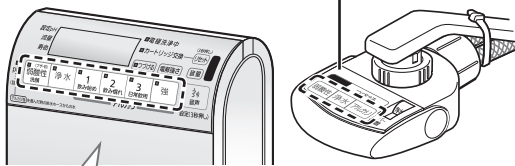

♪) 音声ガイドで選んだ水質をお知らせ

- 「アルカリ1~3」「浄水」をつづけて使うときは水質を選んだあと、つづけるボタンを押してください。(P.33)

3 水栓(蛇口)を開け、水を出す

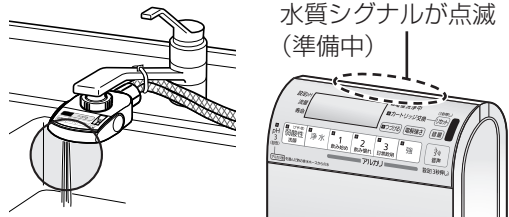


4 「ピッピッピッ」と3回鳴ったら 使う

水質シグナルが点灯

使用中の表示や
便利な機能について

P.30~35

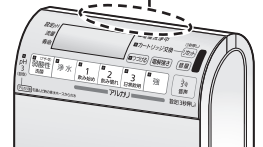

- 弱酸性使用中は、まちがって飲用しないよう、警告のブザーが鳴ります。(弱酸性ブザー)

5 終わったら 水栓(蛇口)を閉める

- お買い上げ時は、アルカリ強・弱酸性を使用後、自動的に水質切替ボタンの水質が「浄水」に切り替わります。「アルカリ1~3」に切り替わる設定もできます。(P.32)「アルカリ優先」に設定する
- 排水ホースから約90秒間水が出ます。(電極自動洗浄または本体内の水抜きのため)


使いた(水を出す)

原水(水道水)を出す

80℃未満の水温で使用してください。(水切換レバーの故障の原因になります。)

1 水切換レバーを動かし、 シャワーまたは ストレートにする

水切換レバー
を上げる

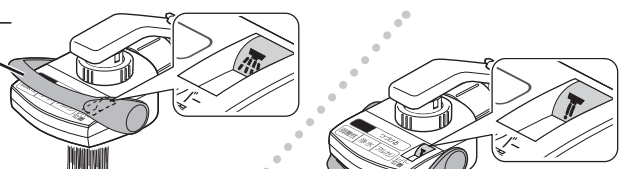

シャワー

2 水栓(蛇口)を開け、 水を出す


水切換レバー
を下げる



ストレート

7 使いかた(水を出す)(つづき)

アルカリイオン水・弱酸性水・浄水を使用中(通水中)は…

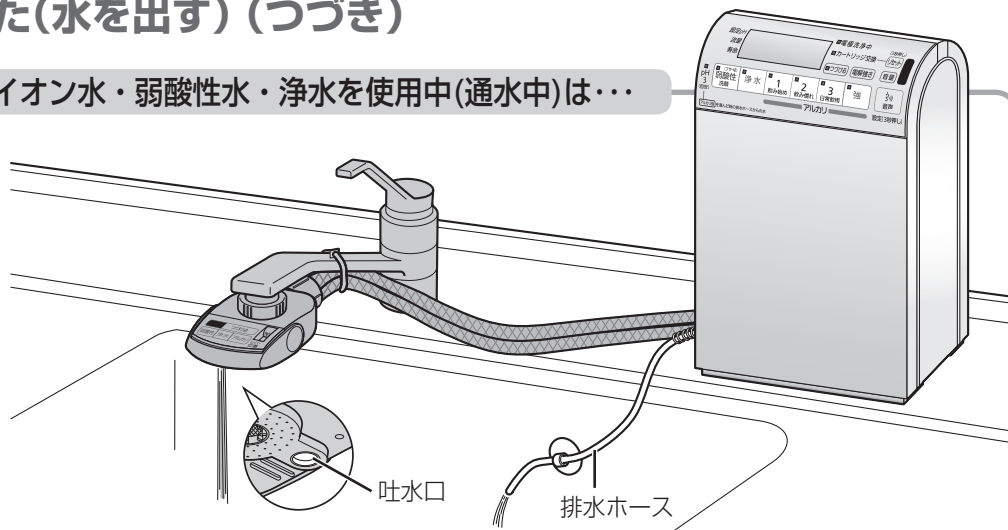

■排水ホースからも水が出ます。(ためて食器洗いなどにご使用ください。)


- アルカリイオン水使用中は…酸性水が出ます。(pHの目安については(P.57)「Q17」)
(pH3程度の酸性水を出すこともできます。下記参照)
- 弱酸性水使用中は…アルカリイオン水が出ます。(飲用ではありません。)
- 浄水使用中は…浄水が出ます。(飲用ではありません。)

お願い ●排水を容器などにためる場合は、容器の水面が本体底面より高い位置にならないようにしてください。また、排水ホースの先端部分は、水面から離してください。(P.21)

■選んだ水質を点灯する色でお知らせします。(水質シグナル)

アルカリ強：オレンジ アルカリ1～3：ブルー
 浄水：グリーン 弱酸性：ピンク

- 水質シグナルが消灯したら、水栓をゆっくりと開けてください。(詳しくは(P.32))

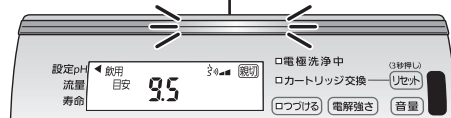

酸性水(pH3)を出す

「アルカリ強」を使用中に水栓を絞ると、排水ホースからpH3程度の酸性水を出すことができます。(用途については(P.28))

1 水切換レバーを「浄水」にし、 強 を押して、水を出す (P.29)


2 本体のpH3の水質表示ランプが点灯するまで、水栓をゆっくり絞る



表示部(通水するとき)

■ 使用中

(例：アルカリ3の場合)

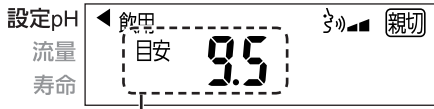

浄水るときは「- - -」と表示




■ 水栓を閉じて30秒間

カートリッジの寿命を表示 (P.42)



■ 水栓を閉じて30秒後


節電のため、液晶表示はボタン操作が終わってから、または水栓を閉めてから、約30秒後に消灯します。
(再度操作または本体に通水した時に点灯)

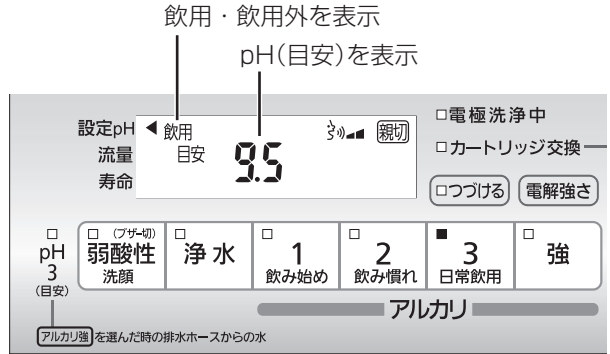


- 流量が低下(約1.0 L/分)すると、通水中でもカートリッジ寿命を表示します。この場合、電気分解していません。

「水栓絞る」の表示が出たら

アルカリ・弱酸性使用中、水の流量が多すぎると「水栓絞る」と表示します。
(十分なpHが得られないことがあります。)

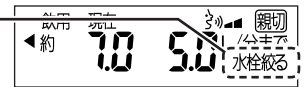


(例)アルカリ1～3の場合

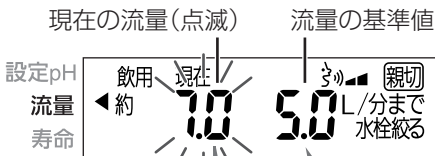

流量の基準値まで
ゆっくりと水栓を絞る

- 水栓を絞っていくと、点滅している現在の流量の数値が下がっていく

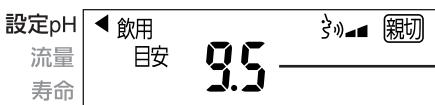

- 水の流量が基準値まで下がると、現在の流量表示が消え、pH(目安)表示に変わります。

- メモ ● 「水栓絞る」の表示は、水質シグナル点灯後、3秒以内には出ません。
- 流量の基準値


設定	流量
アルカリ1～3	5.0(2.5)* L/分
弱酸性	3.2 L/分
アルカリ強	2.2 L/分

*電解強さボタンを強めに設定すると、約2.5L/分になるので、「水栓絞る」の表示が出やすくなります。(P.36)


7 使いかた(水を出す) (つづき)

水質シグナルが消灯したら

水栓を絞りすぎたり、水道水圧の変化で流量が低下すると、止水されたと本体が判断し、水質シグナルが消灯します。(アルカリ・弱酸性を選択していた場合は電解中止)

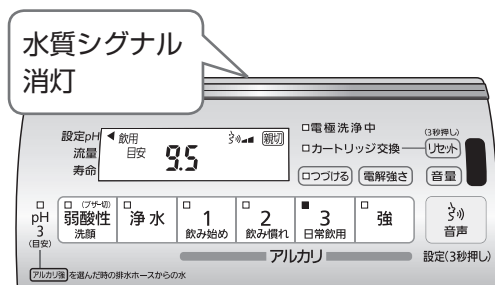

- 表示部にはカートリッジ寿命が表示されます。

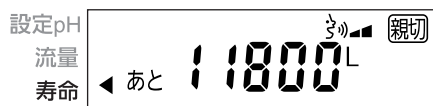

- 正常な状態では水質シグナルが、「点灯」または「点滅」になっています。



- 自動洗浄が始まります。(P.35)

ゆっくりと水栓を開く



- 水質シグナルが点滅(「準備中」と表示)

水質シグナルが点灯したら使えます。

メモ

- アルカリ強または弱酸性を使用していたときは、水質が「浄水」に切り替わります。再度、設定しなおして水栓を開いてください。

「アルカリ優先」に設定する

アルカリ強・弱酸性・浄水使用後に水栓を閉めたとき(水質シグナルが消灯したとき)、自動的に前回使用した「アルカリ1~3」に戻るように設定できます。(お買い上げ時:「浄水」(P.29))

- 操作は、水栓を閉めてから行ってください。(通水中は、操作できません。)
- 設定は本体で行います。


1

「ピッ…」と4回鳴るまで

3 日常飲用 を押す (約3秒間)

- 設定を解除するには、

「ピー」と鳴るまで 3 日常飲用 を押す (約3秒間)

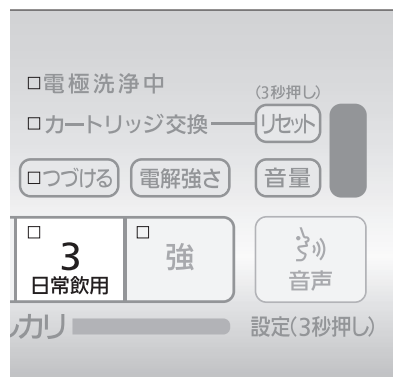

メモ

- つづけるランプ(P.33)が点灯しているときは、ランプが消灯したあと「アルカリ1~3」に戻ります。

「つづける」ボタン

アルカリ1～3または浄水をつづけて使用するとき便利です。


- 水栓を閉めても、電極自動洗浄 (P.35) を行いません。
- 本体、リモコン部のどちらでも操作できます。
- アルカリ強・弱酸性では、つづけるボタンは使用できません。

こんなときに…


- お米をとぐときに
- 計量カップを使うときに
- 料理で少しずつ差し水をするとき
- つづけてアルカリイオン水を飲むときに



つづけるボタンを使用していない場合

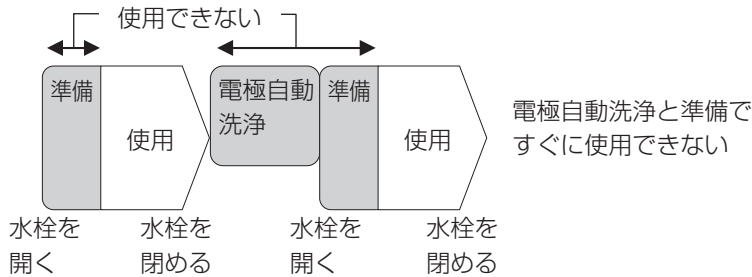

つづけるボタンを使用した場合 (アルカリイオン水を使用)

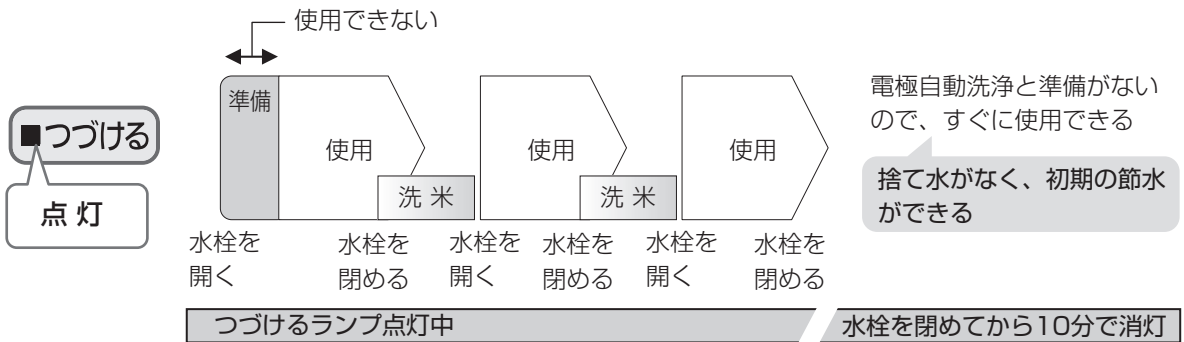

メモ

- ランプ消灯時、つづけるボタンの機能は解除されます。次の場合に消灯します。
 - つづけるボタンを再度押す
 - 「アルカリ1～3」から「浄水」「アルカリ強」「弱酸性」に切り替えたとき
 - 「浄水」から他の水質に切り替えたとき
 - 水栓を閉めてから約10分後

7 使いかた(水を出す) (つづき)

音声ガイドの設定を変える

音声ガイドのモードを変更できます。(3段階：親切<お買い上げ時>・通常・切)

モード	お知らせする内容
親切	操作したボタン、異常の内容、飲用可または使用可のときの水质
通常	操作したボタン、異常の内容
切	異常の内容





1 「ピッ」と鳴るまで を押す (約3秒間)

設定(3秒押し)

- 押すごとにモードが変わります。

本体表示部

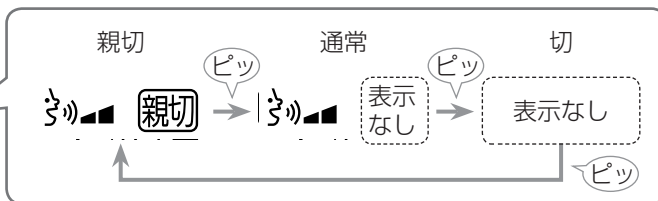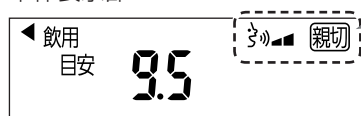

- **メモ** ● 音声ガイドを「切」に設定にしても、ブザーは鳴ります。(音声ガイドを「切」にする前に設定していた音量になります。)



音量を変える

ブザーと音声ガイドの音量を変更できます。(3段階：大・中<お買い上げ時>・小)

1 を押す

- 押すごとに音量が変わります。

本体表示部

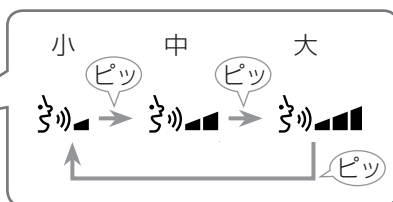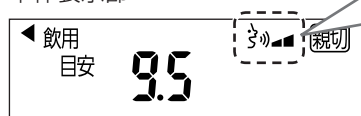


- **メモ** ● 音声ガイドを「切」に設定しているときは、音量の設定は変更できません。
- ブザーの音量は、音声ガイドの設定と同じになります。

弱酸性ブザーをとめる


弱酸性水を使用中に鳴り続ける警告のブザーを、一時的にとめることができます。

1 使用中に を押す

- **メモ** ● 弱酸性ブザーを鳴らないように設定もできます。(通水中はできません)

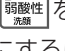「ピー」と鳴るまで  を押す(約3秒間)

- 再度、鳴るようにするには「ピッ…」と4回鳴るまで  を押す(約3秒間)

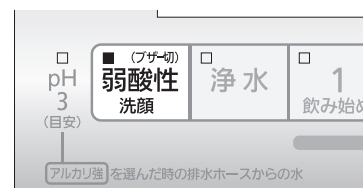



自動洗浄について

本器は、止水ごとに、毎回自動的に本体内の洗浄を行います。

また、一定の時間経過や使用休止でも、通水すると自動的に通水洗浄を行います。



お願い ●電源コンセントは抜かないでください。

止水ごとに自動洗浄する

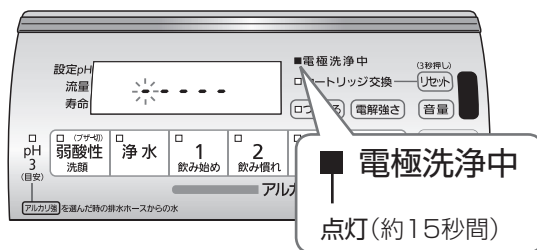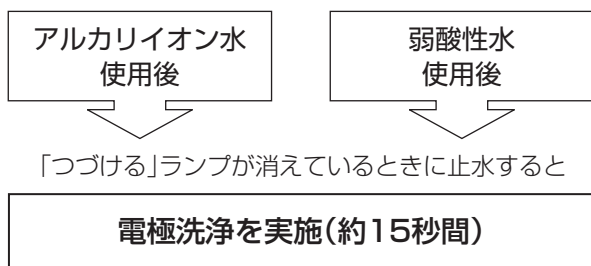

お願い ●排水ホースから出てくる水は洗浄水ですので、使用しないでください。(約90秒間)


時間経過で自動洗浄する

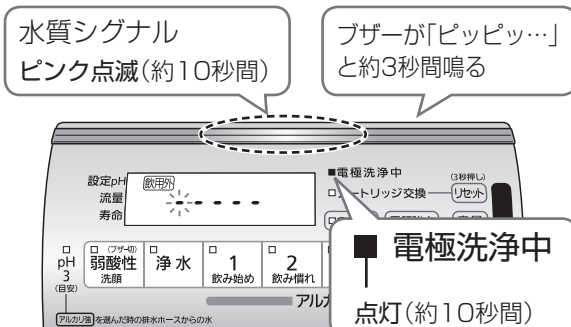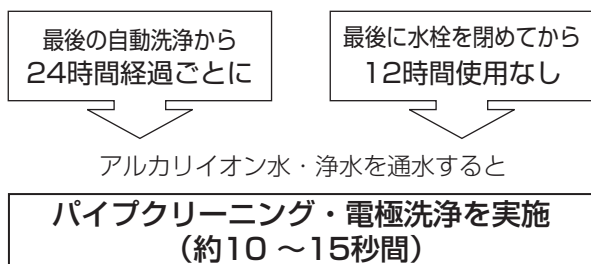

お願い ●洗浄が終了するまで止水しないでください。途中で止水すると、同じ動作を繰り返します。
●洗浄中に、「水栓絞る」の表示が出た場合、表示が消えるまで、水栓を絞ってください。
●吐水口や排水ホースから出てくる水は洗浄水ですので、使用しないでください。(約15～20秒間)
●ブザーが「ピッピッピッ」と3回鳴ってから使用してください。

メモ ●「電極洗浄中」ランプが点灯しているときは、パイプクリーニング・電極自動洗浄中です。

パイプクリーニング・電極洗浄について

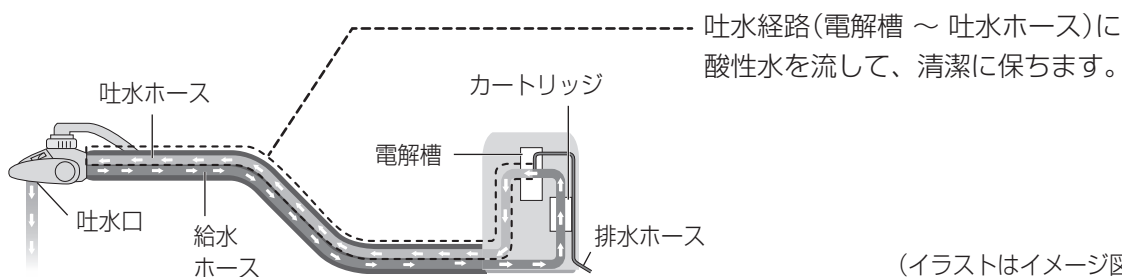

使いかた(水を出す)(つづき)

電解強さボタンで調整してもまだpHの数値が低いときは

カルシウムを添加する


標準設定に対してpHが0.1~0.3上がります。(水質や使用条件により異なります。)

- メモ**
- カルシウムの添加は、電気分解をより活性化させるためであり、摂取を目的としたものではありません。
 - 添加後、1日30リットル使用した場合、約1週間効果が持続します。(目安)

- お願い**
- カルシウム添加筒は、清潔な手で扱ってください。
不衛生なぬれた手で扱った場合、機器内部にカビが発生するおそれがあります。


1 カルシウム添加筒を取り出す

- 1 水栓を閉める
- 2 本体の背面カバーをはずす
(本体を倒さないでください)
- 3 カルシウム添加筒のつまみを持ち、止まるところまで回す
- 4 上へ引き抜く
- 5 キャップをはずす

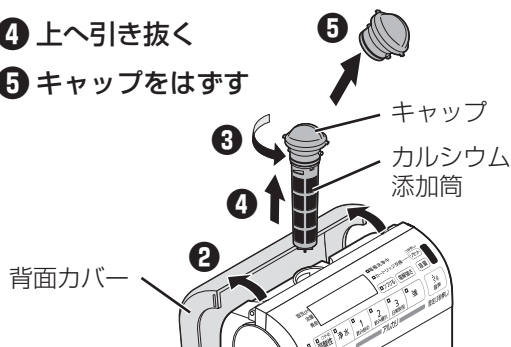

2 水切換レバーを「ストレート」または「シャワー」にする

- 「浄水」にすると、水があふれます。

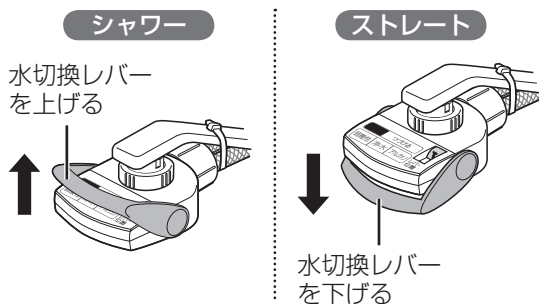


3 添加筒とキャップの内側を清潔な手で丁寧に水で洗う


添加筒内やキャップの内側にカルシウムが残っていたときは…

残っているのはカルシウム流出後の残留物です。水をかけながら箸にガーゼを巻きつけたものなどできれいに取り除いてください。

4 カルシウム1袋(6グラム)を添加筒に入れる

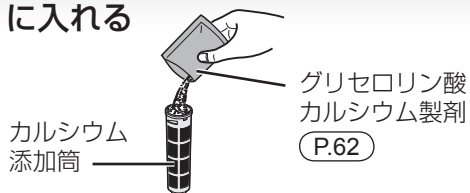

5 添加筒にキャップを取り付ける

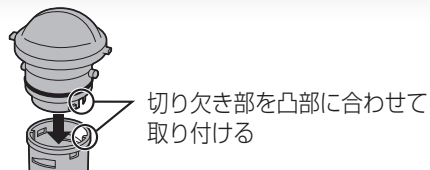

6 添加筒を本体に取り付ける



- お願い**
- カルシウム添加筒のキャップは「閉」の位置まで確実に締めてください。キャップを取り付けずに通水すると、水があふれます。

7 背面カバーを取り付ける (P.45)

- 添加後は、再度 pH 値を測定してください。(P.25)

水質(pH)を調整する

お手入れ

ふだんのお手入れ


本体・水切換レバー部

- 柔らかい布に水を含ませ、かたく絞ってふいてください。
(特にリモコン送受信部の表面が汚れると、感度低下の原因になります。)

お願い ●リモコン部に、水を直接かけたり、洗ったりしないでください。(故障の原因)

- 出水部の汚れ※は、歯ブラシなどで取り除いてください。

※洗いの飛びはねが付着すると汚れや生活カビの原因になります。
また、吐水口から汚れや生活カビが吐水ホース内に入り、
汚れや水あかの原因になります。
使用するたびまたは定期的なお手入れをおすすめします。

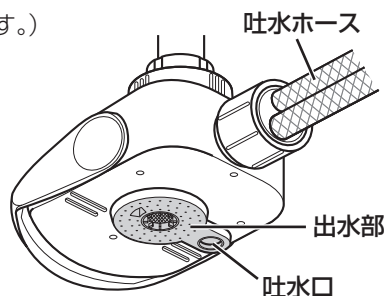

水切換レバー部

リモコン赤外線
送信部

リモコン部

リモコン赤外線
受信部

塗装部

お手入れ

お願い

- 洗剤・クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・
灯油などは使わないでください。
まちがって使用したときは、すぐ水ぶきをし、表面の
洗剤などを取り除いてください。

(洗剤が通水に混じる、樹脂の割れ・塗装部のはがれ・
変色・変形の原因)

- 金属製のブラシなどは使わないでください。(きずの原因)

⚠ 注意

本体に水をかけたり、洗ったりしない



水ぬれ禁止

漏電・感電・故障の原因
になることがあります。

1年に1回程度のお手入れ

本体通水路洗浄・本体洗浄

長く清潔にご使用いただくために、1年に1回程度、下記の別売品で洗浄されることをおすすめします。

- 通水路洗浄剤、カルシウム添加筒は機器内部が不衛生にならないよう清潔な手で扱ってください。
- 水質の硬度が高い地域では、通水路にカルシウムが付着することがあります。「本体洗浄用カートリッジ」でお手入れしてください。



警告

通水路洗浄剤と本体洗浄用カートリッジを一緒に使用しないでください。



禁止

有毒な塩素ガスが発生する原因になります。



青色



	通水路洗浄剤 (P.62)	本体洗浄用カートリッジ (P.62)
こんなときに	<ul style="list-style-type: none"> ●本体に1ヶ月以上通水しなかったとき ●添加筒・吐水ホース内の汚れ、浄水した水でにおいや味が気になったとき 	浄水した水に白いもの(カルシウム)が浮遊している、または白いものが沈殿しているとき
効果	添加筒・吐水ホース内の汚れや水あか、におい、味の原因となる通水路関係の汚れを除去し、衛生的に保ちます。	電極板や配管に付着したカルシウムの除去 〔電極板に付着したカルシウムを除去することで、電解能力が回復します。〕
推奨洗浄頻度	1年に1回程度	1年に1回程度
きれいにする範囲	カルシウム添加筒、吐水路、排水路	電解槽、カルシウム添加筒、吐水路、排水路
仕様	成分	次亜塩素酸カルシウム(粒状)
	洗浄にかかる所要時間	約6～10時間
	形状	カルシウム添加筒と同一形状
	挿入場所	カルシウム添加口へキャップに取り付けて挿入 ●本体背面のカバーをはずしてカルシウム添加筒を洗浄剤の入ったもの(青色)と交換し、カルシウム添加口へキャップに取り付けて挿入してください。
品番	PVL-P8641S (洗浄1回分)	PRA-B8620S (洗浄1回分)

●詳しい使いかたは、それぞれに付属の説明書をご覧ください。

お手入れ (つづき)


1年に1回程度のお手入れ (つづき)

水切換レバー取付口のフィルターに、ごみなどが詰まると水量が少なくなります。
1年に1回程度、下記の手順で清掃してください。


水切換レバー取付口 (フィルター、注水口)

1 ナットをゆるめ、水切換レバーをはずし フィルターとパッキンを取り出す


- 水切換レバーは「浄水」にしてください。
- 水切換レバー部全体を少し回すと、ナットがゆるみやすくなります。

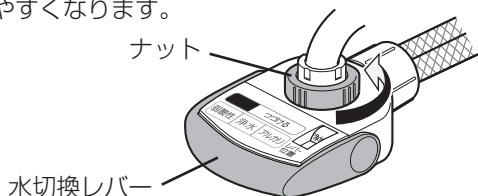

(例：泡沫用つぎてによる取り付けの場合)

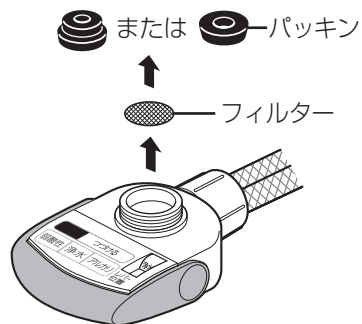


2 フィルターと注水口を洗う

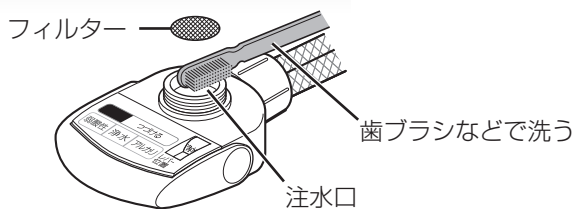


3 水切換レバーを取り付ける

- フィルターを必ず取り付けてください。
- 取り付け後、「ストレート」または「シャワー」で約5秒間水を流してください。

お願い ●ナットを締め付けるときは、
工具を使わないでください。
(ナット破損の原因)

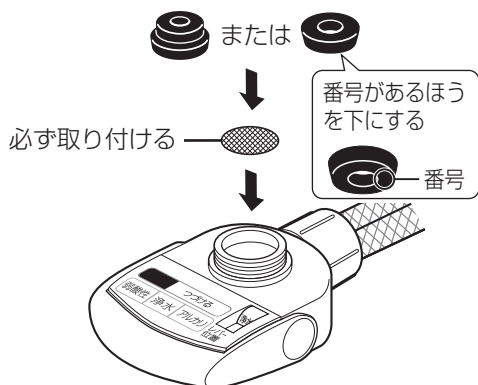

ナットを確実に
締め付ける

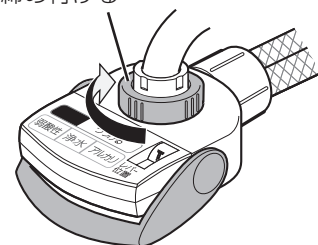


(例：泡沫用つぎてによる
取り付けの場合)

パッキン・フィルターの交換

パッキンについて

- 蛇口に取り付けるとき、下図のようにパッキンを使用する必要があります。
- パッキンはゴム系素材を使用しているため、定期的(約3年目)に交換してください。
- 長期使用の場合、ゴムの劣化および変形、傷により水漏れを起こす場合があります。
- 詳しくは、(P.63, 64)で確認してください。

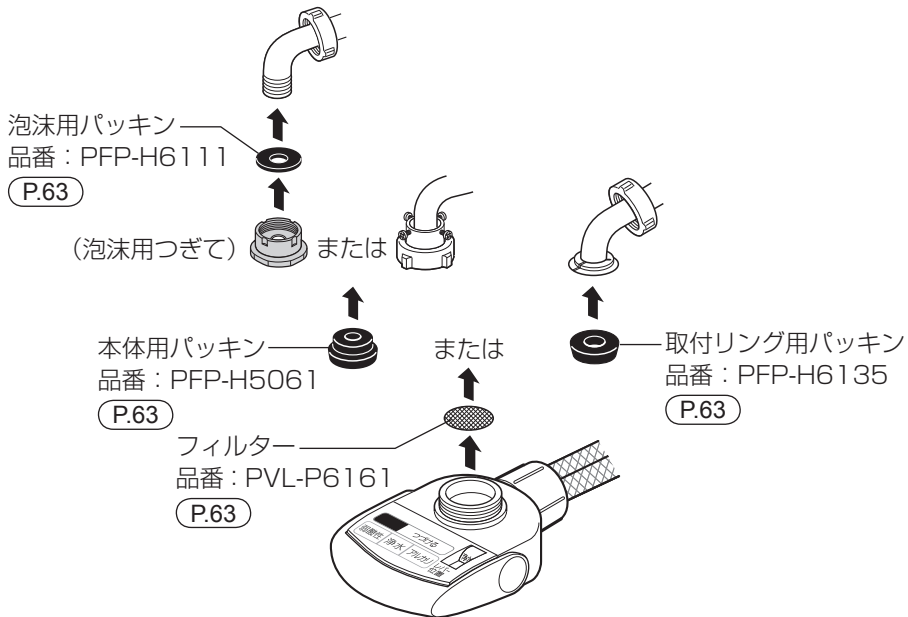

メモ

吐水量が少なくなる場合

(1) フィルターの目詰まり

- フィルターは水道管に付着した大きなゴミ(配管水あか、さび等)を取り除いています。
- フィルターが目詰まりを起こすと水の出が悪くなります。お手入れをしても付着物を取り除くことができなくなった場合は、フィルターを交換してください。

品番：PVL-P6161 (P.63)

- フィルターを外した状態で整水器を使用すると、水切換レバーが故障する場合があります。その場合、水切換レバーを交換してください。

(2) フィルターの目詰まり以外

- 水温が低い場合(カートリッジに水が通りにくくなるため)
- 水圧が低い地域(70 kPa以下)で使用した場合
- 地域の水道水圧が低下した場合・水道工事の直後など、断水していた場合
- カートリッジの目詰まり

カートリッジを交換する

寿命がきて浄水能力が低下したカートリッジは、新しいカートリッジと交換してください。



交換用カートリッジ
品番：TK7815C1

(P.62)

カートリッジの寿命

総通水量 12 000リットル*

使用期間約2年

浄水・アルカリイオン水の
流量が極端に少ない(目詰まり)

* 家庭用浄水器試験方法：JIS S 3201 での数値

メモ

- 寿命(交換)の目安について
 - ・1日30リットル使用したとき：約1年
 - ・1日15リットル使用したとき：約2年
- 一般の水道水では水質(濁り、鉄サビなど)・水圧により、目詰まりの時期に大幅な差が出ることがあります。(P.43)

■ カートリッジの寿命を表示部で確認する(水栓を閉めて30秒間)


カートリッジの残り寿命を表示

- 交換目安となる総通水量(12 000リットル)までの残量を表示
- 通水量と通電時間を積算しています。

交換目安(2年)の10日前になると、寿命表示が右記のように時間に変わります。(1時間単位)

設定pH
流量
寿命
目安
あと
240h

例：残り240時間

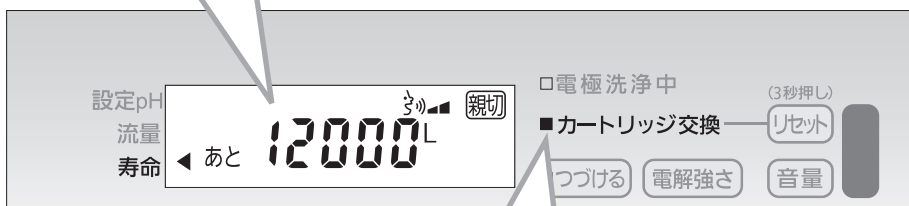

カートリッジ交換ランプ(赤色)

- カートリッジの目詰まりなどで流量が低下した場合や、カートリッジの寿命表示が「150L」以下または「240h」以下になった場合に点滅します。

点滅(通水中のみ)

交換時期が近づいています。
新しいカートリッジを準備してください。

点灯(常時)

交換してください。(P.43)
点灯中はアルカリイオン水、弱酸性水はつくれません。

カートリッジの交換時期

■ カートリッジ交換ランプが点灯したら交換してください。(表示部でも下記のいずれかでお知らせ)



表示部



目詰まりによるカートリッジの寿命です。(P.48)



総通水量が12 000リットルを超えました。(P.49)



カートリッジの使用期間が2年を超えました。(P.49)

お願い ●使用量が少なくても、最大2年で交換してください。

■ カートリッジ交換ランプが点灯しなくても、次のようなときは交換してください。

においいやな味がするとき(カートリッジの除去能力の低下)

カートリッジの除去性能について


● 除去できる物質

- 遊離残留塩素
- 総トリハロメタン*
- ジブromokloroメタン
- トリクロロエチレン
- CAT(農薬)
- 濁り
- クロロホルム
- ブロモホルム
- 1,1,1-トリクロロエタン
- 2-MIB(カビ臭)
- ブロモジクロロメタン
- テトラクロロエチレン
- 溶解性鉛


*クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブromokloroメタン、ブロモホルムの4種類の化合物の総称です。

● 水質による使用期間の違い


カートリッジには、細かな汚れを除去するために、中空糸膜フィルターが内蔵されていますので、目詰まり物質が多い水質では寿命が短くなります。

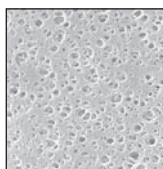

中空糸膜表面
(新品時)

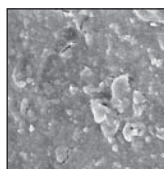

目詰まりした
中空糸膜表面

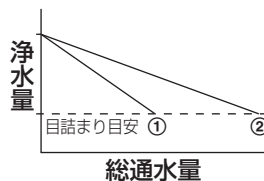

- ① 目詰まり物質の多い水質
- ② 標準的な水質

カートリッジを交換する(つづき)

カートリッジの交換のしかた

はじめに(注意事項)

●電源プラグを抜かない。


電源プラグを抜くと、カートリッジ寿命のリセットができません。

●本体を倒さない。

本体を倒すと、機器内部に水が入り、故障の原因になります。

●最初に水栓を閉めておく。


また、カートリッジをはずした状態で通水しないでください。
水があふれ出ます。

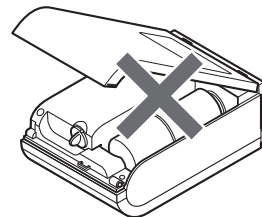

交換の手順


1 背面カバーを取りはずす

前面(パネル側)

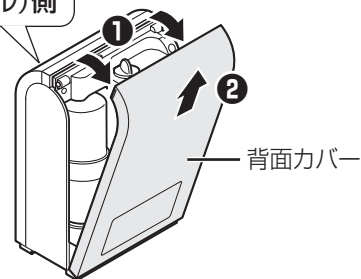


2 古いカートリッジを 取りはずす

- カートリッジ上部を押し下げて、
図のように手前に引くとはずれます。
- カートリッジから水が落ちますので、
注意してください。この水が本体の
底面から出てくることがあります。
(水漏れではありません。)

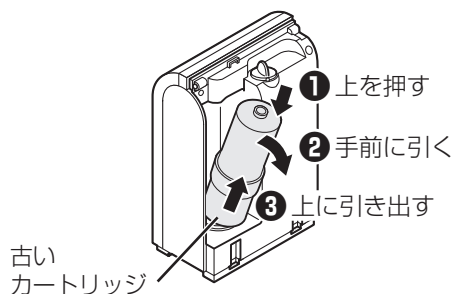

3 新しいカートリッジを 取り付ける

- 取り付けたあと、カートリッジを押し
上げてください。
- カートリッジの品番ラベル(銀色)は、
はがさないでください。
(水が漏れる場合があります。)

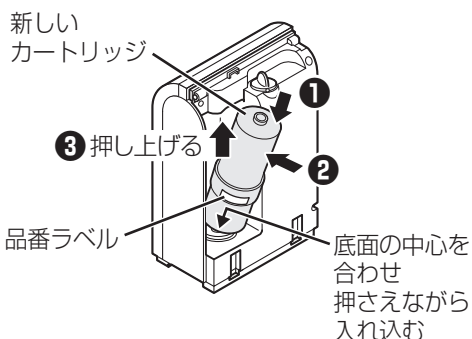

4

(3秒押し)

リセット

を押す (約3秒間)

- ブザーが「ピー」と鳴り、カートリッジ交換ランプが消えるまで押し続けてください。

カートリッジ交換ランプ

- 消灯を確認する

□電極洗浄中

□カートリッジ交換

(3秒押し)

リセット

□つづける


電解強さ

音量

5

水栓を開き、水切換レバーを「浄水」にし、本体に通水する (約3~4分間)


- 通水すると水質シグナルが約20秒間点滅します。
- 通水中、カートリッジ取付部から水漏れがないことと、排水ホースから水が出ていることを確認してください。

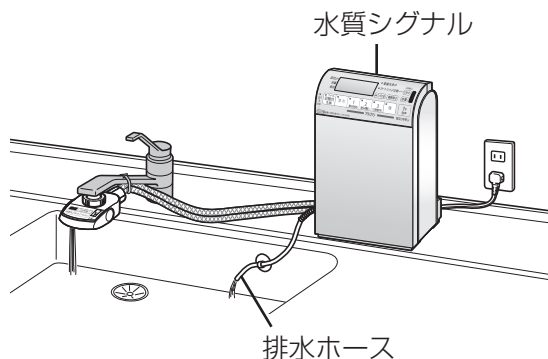

6

水栓を閉め背面カバーを取り付ける

背面カバー ② カチッと音がするまで押す

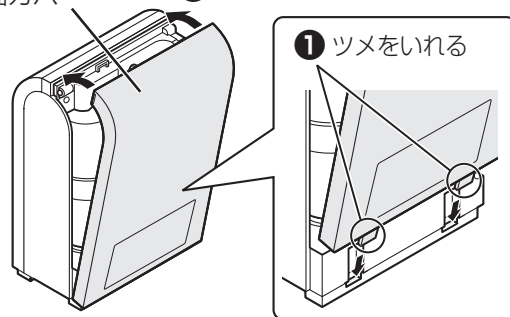

お願い

- 使用済みのカートリッジは、地域で定められた条例に従って廃棄してください。
(カートリッジケースの材質はABS樹脂です。ろ材の種類は「仕様」(P.61)を参照してください。)
- カートリッジ交換ランプが点滅または点灯する前にカートリッジを交換する場合も、必ず手順4で(3秒押し)リセットをブザーが「ピー」と鳴るまで押し続けてください。(約3秒間)
[カートリッジの寿命を正しく表示するため]

メモ

- カートリッジ交換後、アルカリイオン水をコップに注ぐと白い泡がつくことがありますが、異常ではありません。(P.57)

カートリッジを交換する(つづき)

停電・断水の時

■停電時

- 使用中に停電したときは水栓を閉めてください。
- 通水すると「浄水」が出てきます。
- 通電後は通常通りに使用できます。
(通電後は「浄水」に自動的に戻ります。)
- 停電しても、設定された内容は解除されません。

■断水時

- 使用できません。
- 使用中に断水したときは水栓を閉めてください。
- 断水が解除されたときは水切換レバーを「ストレート」または「シャワー」にして、まず原水(水道水)を流し、配管内の空気や濁った水を流し出してください。その後は、通常通りに使用されても問題ありません。
(空気や濁った水を本体に通水すると、カートリッジの寿命が大幅に短くなるため)

リモコンのチャンネルを設定する(2台使用の場合)

同じキッチン内などで、リモコン方式のアルカリイオン整水器を2台お使いになる場合、それぞれのリモコンで操作するには、赤外線チャンネルの設定が必要です。

下記の手順で、1台目を「ch1(チャンネル1)」に、2台目を「ch2(チャンネル2)」に設定してください。お買い上げ時は「ch1」に設定されています。

設定のしかた

〔リモコンの動作確認後に、設定の操作をしてください。〕

① 設定を変更する本体のみ電源プラグを差し込む

- もう1台の電源プラグは抜いておいてください。


② 水栓を閉めた状態で、リモコン部の **つづける** を本体のブザーが「ピー」と鳴るまで押す

- 表示部に「ch2」が表示され(約3秒間)、本体とリモコン部の設定が、「ch2」に切り替わります。

※「ch1」に戻すときは…


もう一度 **つづける** を押す(約5秒間)

- ブザーが「ピッ…」と4回鳴り、表示部に「ch1」が表示されます。

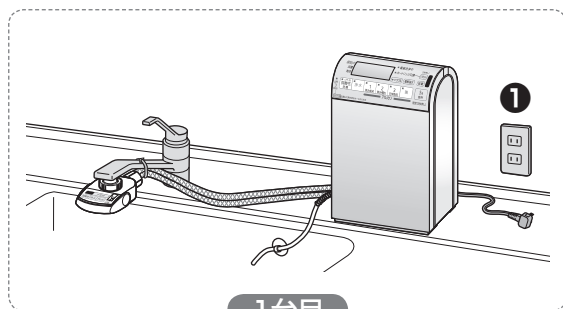

1台目

お買い上げ時
ch1

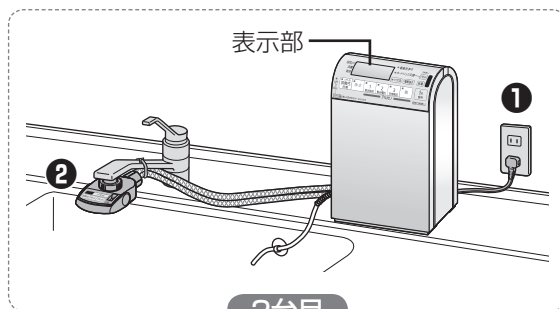

2台目

お買い上げ時
ch1 → 設定変更
ch2


本体を移設するとき

下記の手順で、本体の水抜きをしてください。

※ カルシウム添加筒は、機器内部が不衛生にならないよう清潔な手で扱ってください。

1 カルシウム添加筒を取りはずす


- 1 電源プラグを抜く
- 2 背面カバーを取りはずす
- 3 カルシウム添加筒のつまみを持ち、止まるところまで回す
- 4 上へ引き抜く

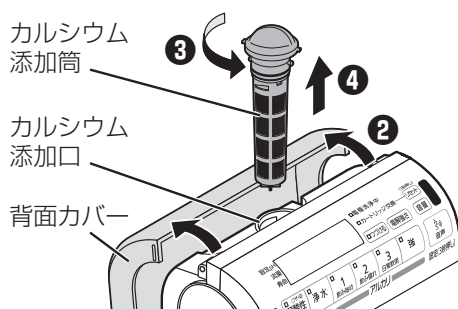

- 添加筒内にカルシウムが残っている場合は、きれいに取り除いてください。

2 本体を逆さまにして、カルシウム添加口から内部の水を排水する

3 水切換レバーから給水・排水ホースを取りはずす

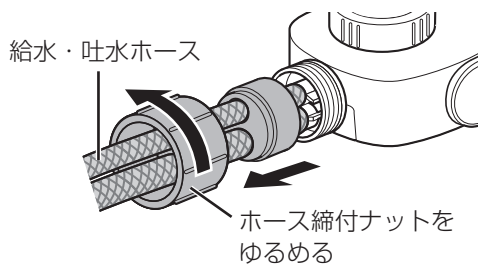


- 給水・吐水ホースをはずした後、ホース締付ナットとホースガイドは、水切換レバーに元どおり取り付けてください。(紛失を防止するため)

4 カートリッジを取りはずす



- カートリッジをはずすときに、本体を倒さないでください。また、はずした状態で、本体を倒したり、逆さまにしたりしないでください。(機器内部に水が入り、故障の原因)

5 給水・排水ホース先端を本体より低い位置に置いてホース内の水を排水する

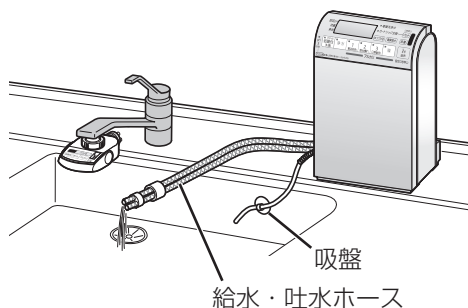

- 吸盤を取りはずしてください。
- 取りはずした添加筒・カートリッジ・背面カバーは、もとに戻してください。

6 水切換レバーを取りはずす

- 水切換レバー内の水は、出してください。
- ナットを固く締め付けた後、水切換レバーごと回転させると、はずれやすくなります。※ はずれないときは、プライヤーなどの工具を使用してください。

- お願い**
- この方法でも十分に水抜きされていないことがありますので、輸送時には水漏れを考慮して包装してください。

このような表示が出たときには

液晶表示に下記のような表示が出たときは、各々の処置をしてください。
処置をしても表示が出る場合は、電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。



…………… 数字の前が「U」の場合は、お客様で対応が可能です。



…………… 数字の前が「H」の場合は、ご自分で分解修理は絶対しないで
お買い上げの販売店にご連絡ください。

異常表示

原因と対応いただく内容

U21

U27

- アルカリイオン水または弱酸性水を、連続して15分以上使用すると「U27」が表示されます。

- 水質、環境によっては、機器の保護のため電気分解を中止します。
(吐水口からは浄水が出ています。)

➔ 水栓を閉め、約3分間待って再度使用してください。

🔊 音声 「保護回路がはたらきました
水栓を閉めて約3分間お待ちください」

U22

U23

- 水質、環境によっては、機器の保護のため電気分解を中止します。
(吐水口からは浄水が出ています。)

➔ 水栓を閉めて使用を中止し、約30分間お待ちください。
(水質、使用環境によっては、30分以上かかることがあります。)

🔊 音声 「保護回路がはたらきました
水栓を閉めて約30分間お待ちください」

U25

流量が1.2 L/分を超えません。

(通水すると、表示部に現在の流量が表示されます。)

※ 電源プラグを一度抜き、再度差し込んでください。

- 水栓を絞りすぎていませんか？

➔ 水栓を開けてください。

- 水圧が低すぎませんか？

➔ 水栓を全開にしてください。

- 給水・吐水ホースが折れていませんか？

➔ ホースをまっすぐにしてください。


※ 以上の処置を行っても、再度「U25」が表示される
(流量が1.2 L/分を超えない)場合は




- 目詰まりによるカートリッジの寿命です。

➔ カートリッジを交換してください。(P.44)

🔊 音声 「カートリッジの目詰まり寿命です…
カートリッジの品番や交換のしかたは…」

異常時の音声ガイドについて


- 異常表示が出たときの音声ガイドの音量は、設定にかかわらず(「切」に設定している場合も)、「3(大)」になります。
- 音声ガイドをもう一度聞くときは、を押してください。

異常表示	原因と対応いただく内容
<p>U26</p>	<p>交換の目安となる総通水量(12 000リットル)を超えました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●カートリッジの寿命です。 ➔カートリッジを交換してください。(P.44) <p> 音声 「カートリッジの寿命です… カートリッジの品番や交換のしかたは…」</p>
<p>U28</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●電解槽の寿命予告です。 (電解時間の累積が約847時間になると予告をします。) ➔販売店にご相談ください。 電解槽寿命は約850時間です。 止水して、電源プラグを一度抜き、再度差し込むと、寿命までの残り約3時間(1日10分使用して、約3週間)使用できます。 <p> 音声 「電解槽の寿命が近づいています 水栓を閉めて電源プラグを抜き差ししてください」</p>
<p>U30</p>	<p>カートリッジの使用期間が2年を超えました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●カートリッジの寿命です。 ➔カートリッジを交換してください。(P.44) <p> 音声 「カートリッジの寿命です… カートリッジの品番や交換のしかたは…」</p>
<p>H31</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●電解槽の寿命です。 電解時間：累積約850時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ) ➔販売店に電解槽の交換を依頼してください。 <p> 音声 「電解槽の寿命です 電源プラグを抜いて販売店に相談してください」</p>
<p>H32~H36 H38</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●機器の故障です。 ➔電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。 <p> 音声 「異常が発生しました 電源プラグを抜いて販売店に相談してください」</p>


このような表示が出たときには

故障かな?と思ったときには

万一故障かなと思われることがありましたら、修理依頼される前に次のことを調べてください。
 なお、異常のときは、ご自分で分解修理は絶対しないで、お買い上げの販売店にご連絡ください。
 ※一度電源プラグを抜き、再度差し込むと、正常に復帰する場合があります。

	症 状	原因と対応いただく内容	参 照 ページ	
表示部 (液晶表示)	何も表示(点灯)しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグが抜けていませんか? ➡電源プラグを差し込んでください。 	—	
	液晶表示が突然消えた	<ul style="list-style-type: none"> ●節電のため、使用していないときは、自動的に表示が消えるようになっています。 ➡故障ではありません。 	31	
	使用中に水栓を絞ると、突然「カートリッジの寿命」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓を絞りすぎたり、水圧の変化で流量が低下したためです。(水質シグナル消灯) ➡「アルカリ強」「弱酸性」をご使用の場合は、再度水質切替ボタンを押し、水栓を開いて流量を調節してください。 	32	
	下記のような表示が出た 	<ul style="list-style-type: none"> ●カートリッジの交換目安となる年月(2年)までの日数が、10日(240時間)になりました。 ➡故障ではありません。 残り時間を、1時間単位で表示しています。 	42	
リモコン	リモコンによる操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●直射日光や蛍光灯の光が、本体のリモコン赤外線受信部に直接あたっているのでは? ➡本体の向きを変え、リモコン赤外線受信部に光が直接あたらないようにしてください。 ●リモコン部のボタンを押したとき、赤外線送信部が点滅(赤色)していないのでは? ➡電池の寿命です。電池を交換してください。 ●本体とリモコン部の赤外線チャンネルが合っていないのでは? ➡赤外線チャンネルの設定をしてください。 	— 17 46	
	水質シグナル	点灯しない、または使用中に消灯する	<ul style="list-style-type: none"> ●設置直後またはカートリッジ交換直後は、通水すると約20秒間点滅後に点灯します。 ➡約3~4分間通水してください。 (カートリッジ内の空気を抜くため) 	9 45
			<ul style="list-style-type: none"> ●流量が不足していませんか?(約1.2L/分以上必要) ➡水栓を開け、流量を多くしてください。 ●カートリッジ交換ランプが点灯していませんか? ➡カートリッジを交換してください。 	32 42 44

故障かな?と思ったときには

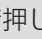
症 状	原因と対応いただく内容	参 照 ページ
水質シグナル アルカリイオン水 または浄水を通水する と、ピンクに点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ● 24時間経過すること、または12時間以上使用しなかった場合は、自動的にパイプクリーニング・電極自動洗浄をします。(ブザーが「ピッピッ…」と鳴り、電極洗浄中ランプが点灯) ➔ 約15~20秒間通水してください。 	35
水質表示ランプ 「アルカリ強」「弱酸性」 使用后、ランプが 「浄水」に変わる	<ul style="list-style-type: none"> ● 「アルカリ強」「弱酸性」使用后、水栓を閉めると自動的に「浄水」に切り替わるようになっています。 ➔ 故障ではありません。 	29
水質表示ランプ 「アルカリ強」「弱酸性」 「浄水」使用后、ランプ が「アルカリ」に変わる	<ul style="list-style-type: none"> ● 「アルカリ優先」に設定されているのでは？ ➔ アルカリ優先を解除する場合は、本体に通水していないときに、を「ピー」と鳴るまで押してください。(約3秒間) 	32
カートリッジ交換ランプ カートリッジを交換 しても、ランプが消 えない	<ul style="list-style-type: none"> ● リセットボタンを押し忘れていませんか？ ➔ ブザーが「ピー」と鳴るまで、リセットボタンを押してください。(約3秒間) ● 電源プラグを抜いた状態で、リセットボタンを押したのでは？ ➔ 電源プラグを差し込み、ブザーが「ピー」と鳴るまで、リセットボタンを押してください。(約3秒間) 	44 45
カートリッジ交換ランプ カートリッジの寿命 表示が「150 L」以下 または「240 h」以下 になっていないのに、 ランプが点滅する ※ 吐水量が少ない、 または出ない	<p>※電源プラグを一度抜き、再度差し込んでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 水栓を絞りすぎていませんか？ ➔ 水栓を開けてください。 ● 水圧が低すぎませんか？ ➔ 水栓を全開にしてください。 ● 給水・吐水ホースが折れたり、つぶれたりしていませんか？ ➔ まっすぐにしてください。 ● 水切換レバー内のフィルターが目詰まりしていませんか？ ➔ フィルターを清掃してください。 ● カートリッジを確実に取り付けていますか？ ➔ 確実に取り付けてください。 ● 断水していませんか？ ➔ 水が出るまでお待ちください。 ● カートリッジの目詰まりなどで流量が低下しています。 ➔ 故障ではありません。 カートリッジの交換時期が近づいています。 	— 20 21 40 41 44 45 46 42 43

故障かな？と思ったときには

故障かな?と思ったときには (つづき)

症 状	原因と対応いただく内容	参 照 ページ
カートリッジ交換ランプ カートリッジの使用期間が2年を すぎても、ランプが 点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグを、長期間抜いていたのでは？ ➔ 故障ではありません。 電源プラグを抜いていると、通水量および通電時間が 積算されないため、カートリッジの寿命が正しく表示 されません。 ※カートリッジの使用期間が2年をすぎている場合は、 交換してください。 	42 43
水切換レバー 選択した吐水口以外 から水漏れする	<ul style="list-style-type: none"> ● 水切換レバー内部へのカルシウムなどの付着が原因と考え られます。 ➔ 薬店でクエン酸をお求めいただき、1リットルの水に 約50gの割合で溶かしてください。リモコン部を 取りはずして、水切換レバー部を約12時間つけた後、 水洗いしてください。 	—
排水ホース 使用後、水栓を閉めた 後に水が出る 使用中、水が出ない 使用中、出ている 水がとぎれる	<ul style="list-style-type: none"> ● 電極自動洗浄または本体の水抜きをしています。 ➔ 故障ではありません。 ● 排水ホースが折れたり、つぶれたりしていませんか。 ➔ まっすぐにしてください。 ● 吐水口と排水ホース先端の、高低差が小さいのでは？ ➔ 高低差を大きくしてください。 	29 35 20 21 21
その他 においやいやな味、 濁りがとれない	<ul style="list-style-type: none"> ● カートリッジの除去能力が低下しています。 ➔ カートリッジを交換してください。 ● カートリッジ交換後、2～3カ月以内に、においがした場合は、 通水路またはカルシウム添加筒に汚れが付着している 可能性があります。 ➔ 別売品の「通水路洗浄剤」で洗浄してください。 <p>下記の場合、ホース内に水が残り、においの原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ホースを束ねているのでは？ ➔ ホースは束ねないでください。 長すぎる場合は、切って使用してください。 ● ホースが浮いているのでは？ ➔ 浮かないように固定してください。 ● 給水・吐水ホースが、キッチンカウンターより低くなっ ているのでは？ ➔ キッチンカウンターより低いところを通らないように してください。 	42 45 39 62 20

故障かな?と思ったときには(つづき)

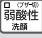症 状	原因と対応いただく内容	参 照 ページ
通水しても音声ガイドが鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 音声ガイドのモードを、「通常」または「切」に設定しているのでは？ ➡ 「親切」モードに設定してください。 	34
本体に通水すると水が温かい	<ul style="list-style-type: none"> ● 通水初期は、止水中に室温や本体内の熱により温められた水が出る場合があります。 ➡ 故障ではありません。水を流してください。 	—
「弱酸性」を使用してもブザーが鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● ブザーが鳴らないように設定されているのでは？ ➡ 本体に通水していないときに、をブザーが「ピッ…」と4回鳴るまで押してください。(約3秒間) 	34
生成水のpHが「pHの目安」の範囲に入らない	<ul style="list-style-type: none"> ● カートリッジが新しいとき(約1週間)は、pH がやや高くなる場合があります。 ➡ 故障ではありません。 約1週間後、再度 pHを測定してください。 	—
弱酸性水の pHが中性を示す	<ul style="list-style-type: none"> ● 弱酸性水の pHが6.5程度の場合は、pH測定表の pH 7 (中性)と見分けがつかないことがあります。 ➡ 「弱酸性」を使用中に排水ホースから出てくる水を測定し、pHが10~11を示していれば、弱酸性水は pH6.5 程度になっています。 	—
本体の下から水が出る	<ul style="list-style-type: none"> ● 温湿度条件によっては、本体内部に結露水が発生することがあります。 ➡ 故障ではありません。 別売品の「結露水排水ホース」を取り付けてください。(本体底面イラスト参照) 	19 62
使用後、水栓を閉めた後に本体から音がする	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体内の水を排水している音です。 ➡ 故障ではありません。 	—
アルカリイオン水の pHがアルカリ性を示さない	<ul style="list-style-type: none"> ● 水質切替ボタンが「アルカリ」になっていないのでは？ (「弱酸性」または「浄水」になっている) ➡ 水質切替ボタンを「アルカリ」に切り替えてください。 	28
	<ul style="list-style-type: none"> ● 原水の水質によっては、アルカリ性を示さない場合があります。(水中の炭酸の影響) ➡ 故障ではありません。 アルカリ「強(強め)」に設定してお使いください。 	36 60
pHが上がりにくくなってきた	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水ホースが折れたり、つぶれたりしていませんか？ ➡ 正しく電気分解できません。まっすぐにしてください。 	20 21
	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体内にカルシウム分が付着し、電解能力が低下しています。 ➡ 別売品の「本体洗浄用カートリッジ」で洗浄してください。 	39 62

その他

故障かな？と思ったときには(つづき)

故障かな?と思ったときには (つづき)

症状	原因と対応いただく内容	参照ページ	
その他	弱酸性水がにおう (プールのような) におい	<ul style="list-style-type: none"> 電気分解により水中の塩素イオンが弱酸性水に集まり、次亜塩素酸が発生するためです。 ➡ 故障ではありません。 	58
	カルシウム添加筒が 変色する	<ul style="list-style-type: none"> カルシウム添加筒に汚れが付着しています。 ➡ 別売品の「通水路洗浄剤」で洗浄してください。 	39 62
	アルカリイオン水に 白い浮遊物が混じる	<ul style="list-style-type: none"> 本体内部に付着したカルシウム分です。 ➡ 別売品の「本体洗浄用カートリッジ」で洗浄してください。 	39 62
	カートリッジ交換後 の、吐水量が少ない	<ul style="list-style-type: none"> カートリッジ内の空気が抜けていないためです。 ➡ 故障ではありません。約3~4分間通水してください。 	—
	水を止めても、吐水 口からポタポタと水 が出る	<ul style="list-style-type: none"> ホース内の水が抜けています。 ➡ 故障ではありません。 	—

■ 水漏れがあるときには

水漏れ箇所	原因と対応いただく内容	参照ページ
水切換レバー接続部	<ul style="list-style-type: none"> 水切換レバーを水栓に確実に取り付けられていますか？ ➡ 確実に取り付けてください。 ※ 泡沫用つぎでの締め付けが弱いときは、給水・吐水ホースをいったん取りはずし、水切換レバーごと回転させると、しっかり締め付けられます。 	13 16
	<ul style="list-style-type: none"> 水切換レバー内の部品は正しく入っていますか？ ➡ 正しく取り付けてください。 	40 41
	<ul style="list-style-type: none"> 水栓(断熱キャップなど)にひび割れがありませんか？ ➡ 水道工事店にご相談ください。 	—
給水・吐水ホース接続部	<ul style="list-style-type: none"> 給水・吐水ホースを水切換レバーに確実に取り付けられていますか？ ➡ 奥まで差し込み、ホース締付ナットで締め付けてください。 	20
本体上部	<ul style="list-style-type: none"> カルシウムキャップを本体に確実に取り付けられていますか？ ➡ カルシウムキャップは「閉」の位置まで締めてください。 	37
本体底部	<ul style="list-style-type: none"> カートリッジを確実に取り付けられていますか？ ➡ 確実に取り付けてください。 	44 45
水栓部分	<ul style="list-style-type: none"> 水栓のパッキンが古くなっていませんか？ ➡ 水道工事店にご相談ください。 	—

よくあるご質問 (Q&A)

ここでは、問い合わせがよくあるご質問をあげてみました。次ページ以降に回答を記載しています。



パナソニックのホームページ <http://panasonic.jp/alkaline/> の「アルカリイオン整水器」でも、ご覧いただけます。(2010年6月現在)

取り付け

- Q1 地下水は使用できないのですか？
- Q2 アルカリイオン水・弱酸性水使用中に排水ホースから水が出ないのは？
- Q3 アルカリイオン整水器の近くにラジオを置くと雑音が入る？

使いかた

アルカリイオン水について(Q4~Q15)

- Q4 初めてアルカリイオン水を使うのですが、どうしたらいいでしょうか？
- Q5 薬を服用しているのですが、アルカリイオン水を飲んでも大丈夫でしょうか？
- Q6 腎臓に持病があるのですが、アルカリイオン水を飲んでも大丈夫でしょうか？
- Q7 アルカリイオン水を飲みはじめたら下痢や発疹になった？
- Q8 アルカリイオン水は、氷にしても使えるのですか？
- Q9 アルカリイオン水と浄水は、どのくらい日持ちするのですか？
- Q10 アルカリイオン水には、カルシウムがどれくらい入っているのですか？
- Q11 アルカリイオン水で作った氷の溶けた水に白いものが浮きますが何ですか？
- Q12 アルカリイオン水、浄水が光って見えますが何ですか？
- Q13 アルカリイオン水で炊飯すると、ごはんがべたつきますが、どうしたらいいですか？
- Q14 アルカリイオン水をコップに注ぐと白い泡がつかました。これは何ですか？
- Q15 鉛(溶解性鉛)は除去できないのですか？
- Q16 乳幼児にはどのような水を飲ませたらいいのですか？
- Q17 アルカリイオン水使用中に、排水ホースから出る酸性水のpHは、どの程度ですか？
- Q18 吐水口と排水ホースからは、全流量に対して、それぞれどれくらいの割合で水が出ているのですか？
- Q19 間違えて酸性水を飲んでしまったのですが、大丈夫でしょうか？
- Q20 弱酸性水がおうのですが、どうしてでしょうか？(プールのようなにおい)
- Q21 本体にお湯を通したのですが、大丈夫でしょうか？
- Q22 使い始めにくらべてpHが上がりにくくなったのですが、どうしてでしょうか？
- Q23 使い始めにくらべてカルシウムが溶けにくくなったのですが、どうしてでしょうか？
- Q24 やかんやジャーポットなどの容器に白い粉がつかますか？

お手入れ

- Q25 カルシウムの補充周期は？
- Q26 グリセロリン酸カルシウム製剤とはどういうものですか？
- Q27 グリセロリン酸カルシウム製剤は、必ず添加しないといけないのでしょうか？
- Q28 交換目安より早くカートリッジ交換ランプが点灯しましたが、どうしてでしょうか？
- Q29 電解槽寿命850時間とは？
- Q30 使用しないととも電源は入れておくのですか？
- Q31 長期間(目安：約1週間以上)使用しないときは、どうするのですか？
- Q32 電気代はどれくらいかかるのですか？

その他

- Q33 総トリハロメタンとは、どういうものですか？
- Q34 2-MIBとは、どういうものですか？
- Q35 CATとは、どういうものですか？
- Q36 使用原水(水道水)の性質別の使用上のポイントは？
- Q37 操作パネル上の、点字表示の内容は？

よくあるご質問 (Q&A) (つづき)

取り付け

Q1

地下水は使用できないのですか？

使用できない場合があります。

地域・水質によっては、指定の pH が得られないことがあります。特に地下水を水源とした地域では、設置前に pH が得られるかを確認するため、酸度測定試薬による酸度の測定を販売店にご相談ください。

Q2

アルカリイオン水・弱酸性水使用中に排水ホースから水が出ないのは？

排水ホースが折れているか、つぶれています。

排水ホースから水が出ない状態で使用すると、故障の原因になります。また、正しく電気分解できませんので、排水ホースを点検し、水が出る状態に設置なおしてください。

Q3

アルカリイオン整水器の近くにラジオを置くと雑音が入る？

本器の近くではラジオに雑音が入ることがあります。ラジオを本器から離してください。

使いかた

Q4

初めてアルカリイオン水を使うのですが、どうしたらいいのでしょうか？

初めて飲む方は、「アルカリ1(飲み始め)」からご使用ください。

少量(コップ1~2杯)ずつを2週間程度使用し、アルカリイオン水に慣れてから、「アルカリ2(飲み慣れ)」または「アルカリ3(日常飲用)」でご使用ください。初めから「アルカリ3(日常飲用)」で飲むと、体調を損なうことがあります。

Q5

薬を服用しているのですが、アルカリイオン水を飲んでも大丈夫でしょうか？

薬を服用する場合は、「浄水」をお使いください。

薬服用以外の飲用、調理にはアルカリイオン水をご使用いただけます。

Q6

腎臓に持病があるのですが、アルカリイオン水を飲んでも大丈夫でしょうか？

アルカリイオン水を飲用する前に医師にご相談ください。

ご相談の際は、下記2点をお伝えください。

- カルシウム・マグネシウム・ナトリウム・カリウムなどのミネラル分が、水道水より増えていること
- pH 9.5 程度のアルカリ性であること

Q7

アルカリイオン水を飲みはじめたら下痢や発疹になった？

飲用を中止し医師にご相談ください。

ご相談の際は、下記2点をお伝えください。

- カルシウム・マグネシウム・ナトリウム・カリウムなどのミネラル分が、水道水より増えていること
- pH 8~9(飲み始め)程度のアルカリ性であること

Q8

アルカリイオン水は、氷にしても使えるのですか？

使えます。

氷にした場合、水道水で作った氷と同じようにお使いください。

自動製氷機能付きの冷蔵庫でタンクにくみ置きする場合は、2日以内に交換してください。

Q9

アルカリイオン水と浄水は、どのくらい日持ちするのですか？

常温では24時間以内にお使いください。

アルカリイオン水と浄水の場合、水道水の中の塩素(殺菌剤)が除去されており、一般細菌が増えやすくなっています。

冷蔵庫で保存する場合でも、清潔な密閉容器に入れて2日以内にお使いください。

※弱酸性水の場合も2日以内にお使いください。



パナソニックのホームページ <http://panasonic.jp/alkaline/> の「アルカリイオン整水器」でも、ご覧いただけます。(2010年6月現在)

Q10

アルカリイオン水には、カルシウムがどれくらい入っているのですか？

水中のカルシウムイオンは原水にくらべて電気分解により20%~30%増加します。また、グリセロリン酸カルシウムを添加した場合、水が電気分解されやすくなり、さらに約10%カルシウムイオンが増加します。

Q11

アルカリイオン水で作った氷の溶けた水に白いものが浮きますが何ですか？

水に含まれているミネラル分です。水を凍らせたときに、ミネラル分が氷の表面に固まったもので、飲んで問題ありません。

Q12

アルカリイオン水、浄水が光って見えますが何ですか？

水に溶けている成分(主としてミネラル分)が析出したものです。飲んでも問題はありますが気になる場合は、pH(水素イオン濃度)を低くしてお使いください。またカートリッジの機能が低下した場合も同様の現象が現れますので、その場合は新しいカートリッジと交換してください。

Q13

アルカリイオン水で炊飯すると、ごはんがべたつきますが、どうしたらいいですか？

水加減や、お米、炊飯器の種類によっては、べたついたり黄色になることがあります。アルカリイオン水のpH(水素イオン濃度)を低くするか、「浄水」をお使いください。

Q14

アルカリイオン水をコップに注ぐと白い泡がつかました。これは何ですか？

本体内の空気が混入したものか、または電気分解のときに発生した泡(水素ガス)です。設置後やカートリッジ交換後に多く発生することがあります。そのままお使いいただいて問題ありません。
※弱酸性水の場合、発生する泡は酸素ガスです。

Q15

鉛(溶解性鉛)は除去できないのですか？

除去できます。

Q16

乳幼児にはどのような水を飲ませたらいいのですか？

乳幼児には「浄水」の飲用をおすすめします。乳幼児は、成人にくらべ胃腸の発達が未熟なため、離乳食に合わせて、「アルカリ1(飲み始め)」から徐々にならしててください。

Q17

アルカリイオン水使用中に、排水ホースから出る酸性水のpHは、どの程度ですか？

下表をご参照ください。
pHは、水質・流量・pH微調整レベルにより異なります。

水質	排水ホースから出る酸性水のpH	用途
アルカリ強	2.8~3.5 (「pH3」の水質表示ランプが点灯したときは、pH3程度)	●茶しぶとり ●魚料理後のにおいとり
アルカリ3	2.8~3.5	ためて 洗い物や お風呂などに
アルカリ2	3.0~4.5	
アルカリ1	4.5~6.0	

Q18

吐水口と排水ホースからは、全流量に対して、それぞれどれくらいの割合で水が出ているのですか？

下記の割合になりますが、測りかたに注意してください。
吐水口から出る水 : 約94% (※約80%)
排水ホースから出る水 : 約6% (※約20%)
※アルカリ3の「強(強め)」・アルカリ強・弱酸性のときは、()内の数値になります。

水が各々出ている状態で同じ容器に同じ時間だけ受けて比べてください。
● 出始めは排水ホースからの水が若干多くなります。
● 止水後は、本体内の水が抜けるため、排水ホース側に多めの水がたまります。
● 流量が少ない場合、排水ホースからの水が若干多くなります。

よくあるご質問 (Q&A) (つづき)

よくあるご質問 (Q&A) (つづき)

Q19

間違えて酸性水を飲んでしまったのですが、大丈夫でしょうか？

少量(コップ1杯程度)なら、心配ありません。ただし、継続的な飲用はしないでください。また、誤って多量に飲んで体調が悪くなったときは、医師にご相談ください。

Q20

弱酸性水がにおうのですが、どうしてでしょうか？(プールのようなおい)

弱酸性水に次亜塩素酸が多く含まれているためです。そのままお使いいただいて問題ありません。電気分解により水中の塩素イオンが弱酸性水に集まり次亜塩素酸が発生します。

Q21

本体にお湯を通したのですが、大丈夫でしょうか？

多少であれば問題ありません。本体に30秒程度水を通し、本体内部の温度を下げてください。

Q22

使い始めにくらべてpHが上がりにくくなったのですが、どうしてでしょうか？

本体内にカルシウム分が付着し、電解能力が低下したためです。

別売品の「本体洗浄用カートリッジ」(P.39, 62)での洗浄をおすすめします。

Q23

使い始めにくらべてカルシウムが溶けにくくなったのですが、どうしてでしょうか？

原因として、カルシウム付着による通水路の詰まりが考えられます。

別売品の「本体洗浄用カートリッジ」(P.39, 62)での洗浄をおすすめします。

Q24

やかんやジャーポットなどの容器に白い粉が付きませんが何ですか？

水中のカルシウムが出てきたものです。

飲んでも問題ありませんが、気になる場合は容器を洗ってください。洗っても容器の白い粉がとれない場合は、薬店でクエン酸をお求めいただき、1リットルの水に50gの割合で溶かし、2~3日つけた後洗い流してください。

お手入れ

Q25

カルシウムの補充周期は？

※pHが「pHの目安」の範囲内に入っていれば、カルシウムを添加する必要はありません。

水質・水温・使用条件などによって異なりますが、目安として約7日間(1日30リットル使用した場合)です。

連続通水した場合などは、カルシウムの溶けかたが早くなる場合があります。また、使用水量が少なく、カルシウムが残っている場合は、1ヵ月以内に取り除き、よく洗ってから新しいカルシウムを入れてください。

Q26

グリセロリン酸カルシウム製剤とはどういうものですか？

グリセロリン酸カルシウム製剤は、食品添加物として認められているもので、飲んでも問題ありません。

Q27

グリセロリン酸カルシウム製剤は、必ず添加しないといけないのでしょうか？

pHを測定してください。(P.24)
pHが「pHの目安」の範囲内に入っていれば、添加する必要はありません。

範囲内に入らない場合は、グリセロリン酸カルシウム製剤を添加してください。pHが0.1~0.3程度上がります。なお、これはカルシウムの摂取を目的としたものではありません。



Q28

交換目安より早くカートリッジ交換ランプが点灯しましたが、どうしてでしょうか？

カートリッジ交換ランプは通水量や通水圧力が低下した場合にも点灯します。(P.42, 43)

水圧低下による通水量不足や、ホースに折れやつぶれがないか確認してください。また、水質によっては早期に目詰まりすることがありますので、その時はカートリッジを交換してください。

Q29

電解槽寿命850時間とは？

電解槽で電気分解ができる累計時間を表し、1日20分使用した場合、約7年相当になります。

電解槽に通電することで電極板が消耗します。「H31」の表示が出たら電解槽の寿命です。販売店に電解槽の交換を依頼してください。

Q30

使用しないときも電源は入れておくのですか？

使用しないときでも電源は入れたままにしてください。

自動洗浄をするためです。

また、電源を入れていないと、通水量および通電時間が積算されないため、カートリッジ寿命が正しく表示されません。

※ 待機時の消費電力は約0.4 Wです。

Q31

長期間(目安：約1週間以上)使用しないときは、どうするのですか？

- カルシウム添加筒に残っているカルシウムを取り除いてください。
- カートリッジは本体から取りはずしてビニール袋に入れ、空気を抜いて口を閉じてから冷蔵庫に保管してください。
- 電源プラグを抜いてください。
- 再使用するときは、カートリッジを取り付けた後、電源プラグを差し込み、約3分間通水し水漏れがないか、また動作や表示に異常がないかを確認してください。

1ヵ月以上使用しない場合は、カートリッジ内の水が変質することがありますので、カートリッジの交換をおすすめします。

また、においやいやな味がするときは、別売品の「通水路洗浄剤」(P.39, 62)で洗浄してください。

Q32

電気代はどれくらいかかるのですか？

1ヵ月あたり、約33円です。

※1日10分使用、電気料金22円/kWhで算出

その他

Q33

総トリハロメタンとは、どういうものですか？

クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブromoホルムの4種類の化合物の総称です。

Q34

2-MIBとは、どういうものですか？

2-メチルイソボルネオール略称で、水道水のカビ臭原因物質のひとつです。

Q35

CATとは、どういうものですか？

2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジンの別名で、農薬の一種です。

よくあるご質問 (Q&A) (つづき)



パナソニックのホームページ <http://panasonic.jp/alkaline/> の「アルカリイオン整水器」でも、ご覧いただけます。(2010年6月現在)

Q36

使用原水(水道水)の性質別の使用上のポイントは？

下表を参考にしてください。

ただし、炭酸を多く含んだ水では、生成したアルカリイオン水が炭酸の影響を受け、アルカリ性を示さない場合があります。この場合アルカリイオン水を沸騰させると炭酸が抜け、本来のアルカリ性を示します。また*硬度の高い水の場合は白く濁ることがあります。

●特に地下水や地下水を含んだ水源ではアルカリ性になりにくいいため、アルカリ「強(強め)」に設定してお使いください。

	海辺や島	温泉地	炭酸を多く含んだ水 (地下水)	硬度の高い水	硬度の低い水
原水の性質	塩水が混入している場合がある	イオンが含まれており、酸性傾向	炭酸ガスが混入しており、酸性傾向 ミネラル分が多く電気が流れやすい	ミネラル分が多く電気が流れやすい	ミネラル分が少なく電気が流れにくい
電気分解されたアルカリイオン水の性質は？	アルカリ性になりやすい	硫酸イオンの働きでアルカリイオン水が中性傾向に	炭酸ガスによってアルカリイオン水が中性傾向に	アルカリ性になりやすい	アルカリ性になりにくい
アルカリイオン水で使用上のポイント	弱めのアルカリを使う	強めのアルカリを使う 水栓を絞る、通水量を少なめにする	強めのアルカリを使う 水栓を絞る、通水量を少なめにする	弱めのアルカリを使う	強めのアルカリを使う 水栓を絞る、通水量を少なめにする

* 硬度：水に含まれるカルシウムやマグネシウムの濃度で、この濃度により、硬度の高い水・低い水になります。

Q37

操作パネル上の、点字表示の内容は？

下表のとおりです。

ボタン	<input type="checkbox"/> (ブザー切) 弱酸性 洗顔 ●●●●	<input type="checkbox"/> 浄水 ●●●●	<input type="checkbox"/> 1 飲み始め ●●●●	<input type="checkbox"/> 2 飲み慣れ ●●●●	<input type="checkbox"/> 3 日常飲用 ●●●●	<input type="checkbox"/> 強 ●●●●	🔊 音声 ●●●●
表示内容	さ さんせい酸性の「さ」	じょ じょうすい浄水の「じょ」	1	2	3	4	こえ
お知らせ	飲用ではありません。	飲用です。				飲用ではありません。	——

仕 様

類	別	機械器具(83)医療用物質生成器
一 般 的 名 称	称	連続式電解水生成器 (JMDNコード 71024000)
医 療 機 器 分 類	類	管理医療機器
販 売 名 称	称	アルカリイオン整水器 TK8051
医 療 機 器 認 証 番 号	号	223AKBZX00199000
定 格	格	交流100 V 2.8 A 50 - 60 Hz
消 費 電 力	力	約240 W (待機時：約0.4 W)
本 体	寸 法	幅200 mm×奥行115 mm×高さ315 mm
	質 量	約4.6 kg (満水時：約5.2 kg)
本 体 使 用 水 温	温	35℃未満 (水切換レバーは80℃未満)
本 体 使 用 可 能 水 圧 (動 水 圧)	圧	70 kPa~350 kPa
使 用 可 能 配 水 管 圧 力 (静 水 圧)	圧	70 kPa~750 kPa
電 解	電 解 方 式	連続電解方式
	吐 水 量 (生 成 水 流 量)	2.0 L/分 [水圧100 kPaのとき] [アルカリ1~3 (アルカリ3の「強(強め)」は除く)使用時]
	電 解 能 力 切 替	アルカリ：4段階 酸性：2段階
	連 続 使 用 可 能 時 間	常温時約15分間 (注2)
	電 解 槽 寿 命	累積約850時間 (イオン水生成時間・洗浄時間のみ)
電 極 洗 浄	オートクリーニング方式	
浄 水 吐 水 量	量	2.0 L/分 [水圧100 kPaのとき]
ろ 過 流 量	量	2.1 L/分 [水圧100 kPaのとき] (注1)
本 体 装 着 カ ー ト リ ッ ジ	リ	TK7815C1
浄 水 能 力 (注 1)	遊 離 残 留 塩 素	12 000L (注3)
	濁 り	12 000L (注4)
	総 トリハロメタン	12 000L (注3)
	ク ロ ロ ホ ル ム	12 000L (注3)
	プ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	12 000L (注3)
	ジ プ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	12 000L (注3)
	ブ ロ モ ホ ル ム	12 000L (注3)
	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	12 000L (注3)
	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	12 000L (注3)
	1,1,1-ト リ ク ロ ロ エ タ ン	12 000L (注3)
	C A T (農 薬)	12 000L (注3)
	2-MIB (カビ臭)	12 000L (注3)
溶 解 性 鉛	12 000L (注3)	
ろ材(カートリッジ)の取替(交換)時期の目安	約1年 (1日30 L使用時) [約2年 (1日15 L使用時)] (注5)	
ろ 材 の 種 類	不織布・粒状活性炭・セラミック・粉末活性炭・中空糸膜	
除 去 で き る 物 質	遊離残留塩素・濁り・総トリハロメタン・クロロホルム・ プロモジクロロメタン・ジプロモクロロメタン・プロモホルム・ テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・ 1,1,1-トリクロロエタン・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)・溶解性鉛	
除 去 で き な い 物 質	水中に溶け込んでいる鉄分・重金属類(銀・銅など)や塩分(海水)	
カ ル シ ウ ム 添 加	強制溶解添加方式、添加筒内蔵 [電解補助剤として]	
電 源 コ ー ド の 長 さ	約2 m	
電 源 保 護 装 置	電流ヒューズ：5 A	
過 昇 温 度 保 護 装 置 (絶 縁 ト ラ ン ス 内)	過熱防止器 (自動復帰式、作動温度：120℃) 温度ヒューズ (作動温度：145℃) 2個	
リ モ コ ン 部 電 源	コイン形リチウム電池：CR2032	
製 造 販 売 元	パナソニック株式会社 東京都港区西新橋2-38-5 西新橋MFビル	
製 造 元	パナソニック株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地	

※ 数値は水温20℃時の値です。 ※ 硬水を軟水に変えることはできません。

※ 通水量および1日の使用水量は、吐水口・排水ホースからの水量を合計したものです。

(注1) アルカリ1~3(アルカリ3の「強(強め)」は除く)、浄水で使用できる水は、ろ過流量・浄水能力の約94%に相当します。
アルカリ3の「強(強め)」、アルカリ強、弱酸性で使用できる水は、ろ過流量・浄水能力の約80%に相当します。

(注2) 水質・使用環境によって短くなることがあります。

(注3) JIS S 3201 試験による除去率 80%の値。

(注4) JIS S 3201 試験によるろ過流量の 50%の値。

(注5) 使用水量・水質・水圧によって大幅に短くなることがあります。交換後2年で本体に「U30」(P.43)が表示されます。

別売品

(価格は2011年4月現在のものです。)

お買い上げの販売店またはパナソニックの製品を扱っている販売店で購入してください。

使いかた、取り付けかたについては、それぞれに付属の説明書をよくお読みください。

- 商品扱いには(商)と記載しています。それ以外は補修部品です。ご購入の際は、販売店に品番とともに、ご連絡ください。

消耗品

●交換用カートリッジ★(P.42)

品番：TK7815C1 (商)

希望小売価格：12,600円(税込)



●グリセロリン酸カルシウム製剤★(P.37)

1袋：6g入×12本

品番：P-A5101 (商)

希望小売価格：3,990円(税込)

- 付属品とは包装が異なります。



●pH試験液★(P.24)

品番：TK805003 (商)

希望小売価格：630円(税込)



●通水路洗浄剤★(P.39)

品番：PVL-P8641S

希望小売価格：1,260円(税込)

- カルシウム添加筒や本体通水路の汚れ、においが気になるときにお使いください。



●本体洗浄用カートリッジ★(P.39)

品番：PRA-B8620S

希望小売価格：2,100円(税込)

- カルシウム除去専用です。



取り付け部品

●大型水栓用金具(内径32.5 mm) (P.11)

品番：P-06JR (商)

希望小売価格：1,155円(税込)

- 水栓先端径が24 mm～32 mmの水栓に使用します。



●泡沫水栓用つぎて(内ねじ用) (P.11)

品番：水栓：

PRV-D8623K W23, 山20

PRV-D8623M W24, 山20

PRV-D8623G M24, ピッチ1mm

希望小売価格：1,050円(税込)

- 水栓メーカー名、水栓品番を確認のうえ、販売店にご相談ください。




●給水ホース(長さ2.5 m)★(P.20)

[給水・吐水一体型]

品番：TK805005

希望小売価格：2,730円(税込)

- 付属のホース(約1.5 m)では長さが足りないときに。

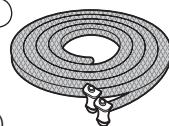

●排水ホース(長さ2.5 m)★(P.21)

品番：PDB-C8616B (商)

希望小売価格：1,050円(税込)

- 付属のホース(約1.5 m)では長さが足りないときに。
- ホースの直径は付属品より太くなります。



●結露水排水ホース(長さ1.5 m)★(P.53)

品番：PDB-C8616K

希望小売価格：1,050円(税込)

- 本体底部から水が漏れるときに。



別売品は販売店でお買い求めいただけます。

★印はパナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>



水切換レバー部

●リモコン部

品番：TK8050S2007

希望小売価格：1,575円(税込)




●水切換レバー(リモコン部含む)

品番：TK8050S7657

希望小売価格：4,200円(税込)

- 下記の固定具①⑥⑧⑨が装着済み

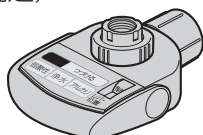

固定具(水切換レバー取付用)


水栓の種類による固定具(①～⑨)の組み合わせについては (P.64)

●泡沫用つぎてA※1

品番：PRV-C8605D

希望小売価格：315円(税込)

- W22, 山20

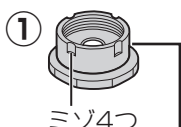


●泡沫用つぎてB※2

品番：PRV-C6402W

希望小売価格：315円(税込)

- M22, ピッチ1mm

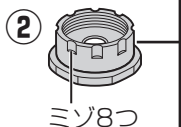


泡沫用つぎての底面に、AまたはBの表示があります。

●取付リング(大)※2

品番：PRV-C8605BC


希望小売価格：210円(税込)

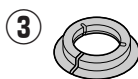

●取付リング(小)※2

品番：PRV-C8605AW


希望小売価格：210円(税込)

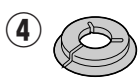

●取付金具(ねじ4本付)※2

品番：PRV-C8615M

希望小売価格：525円(税込)

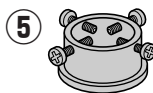


●固定具セット※3

品番：TK7205X7377

希望小売価格：1,470円(税込)

- 固定具②～⑦のセットです。

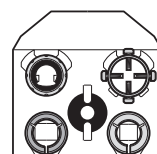

●泡沫用パッキン

品番：PFP-H6111

希望小売価格：105円(税込)



●取付リング用パッキン※2

品番：PFP-H6135

希望小売価格：210円(税込)



●本体用パッキン※4

品番：PFP-H5061

希望小売価格：105円(税込)



●フィルター

品番：PVL-P6161

希望小売価格：105円(税込)




その他

●吐水スタンド (P.12)

品番：TK8051S1 (商)

希望小売価格：14,070円(税込)

- 分岐水栓アダプター(P-A3604)付属
- 分岐水栓、給水コンセントにより取り付けるときに使用します。

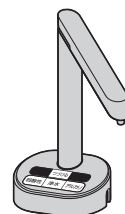


取り付けは、販売店・工事店に依頼してください。

●壁掛けセット (P.19)

品番：TK805009 (商)

希望小売価格：3,150円(税込)

- 本体を壁に掛けて取り付けるときに使用します。

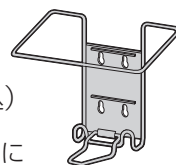

取り付けは、販売店・工事店に依頼してください。

※1 水切換レバーに装着されているつぎてと同じです。

※2 付属の固定具セットの部品と同じです。

※3 付属の固定具セットと同じです。

※4 水切換レバーに装着されているパッキンと同じです。

別売品 (つづき)

水栓(蛇口)形状と固定具(水切換レバー取付用)の組み合わせについて

転居または水栓から水漏れをしているときは、下記の部品をセットでお買い求めください。

●品番や価格など詳細は (P.63) (①)～(⑨) で確認できます)

外側にねじがある水栓(ねじ外径22 mm)

ねじ

⑥		泡沫用 パッキン		⑥
①		泡沫用 つぎて※ ミゾ4つ		②
⑧		本体用 パッキン		⑧
⑨		フィルター		⑨

※2種類あります。

**先端がふくらんでいる水栓
(パイプ外径16 mm・19 mm以外)**

**先端がふくらんでいない水栓
(ストレート型)**

⑤		取付金具(ねじ4本付)
⑧		本体用パッキン
⑨		フィルター

**先端がふくらんでいる水栓
(パイプ外径19 mm)**

③		取付リング(大)
⑦		取付リング用パッキン
⑨		フィルター

**先端がふくらんでいる水栓
(パイプ外径16 mm)**

④		取付リング(小)
⑦		取付リング用パッキン
⑨		フィルター

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは
■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	() -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「このような表示が出たときには」「故障かな?と思ったときには」(48~54ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	アルカリイオン整水器
●品番	TK8051
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間(ただし消耗品は、保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、このアルカリイオン整水器の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

●商品の点検訪問について

お客様からのご相談なしに、商品およびカートリッジの点検案内をすることはありません。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
東北地区	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
首都圏地区	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区未広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	新川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鷲4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
中国地区	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
四国地区	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
九州地区	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
沖縄地区	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご覧ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0511

さくいん

英字

pH試験液	24, 25, 62
pHの測定	24~25
pHの調整	36

あ行

アルカリイオン水	
●使用目的、効能・効果	2
●用途	28
●使いかた	28~34
●pHを調整する	36
アルカリ優先	32
異常表示	48, 49
液晶表示(表示部)	27, 31
音声ガイド	28
●設定を変える	34
●音量を変える	34
音声ボタン	27
音量ボタン	27

か行

カートリッジ	
●交換時期	42~43
●交換方法	44~45
●寿命(寿命表示)	31, 42
●品番	42, 62
カートリッジ交換ランプ	27, 42, 43, 45
カートリッジ品番ラベル	8
壁掛けセット	63
カルシウム	37, 62
●添加口	37, 47
●添加筒	37, 47
給水・吐水ホース	9, 19, 20
吸盤	9, 21
グリセリン酸カルシウム製剤	37, 62
結露水排水口	19
原水(水道水)を出す	29
コイン形リチウム電池	17
固定具セット	13, 14, 16, 63

さ行

酸性水	28, 30, 57
自動洗浄	35
弱酸性水	
●用途	28
●使いかた	28~34
●pHを調整する	36
弱酸性ブザー	29, 34
シャワー(原水)	27, 29

さ行

修理ご相談窓口	65~66
浄水	
●用途	28
●使いかた	28~34
水質切替ボタン	26~29, 60
水質シグナル	27, 29~30, 32
水質表示ランプ	27, 28
水栓(蛇口)形状	10~11
水素イオン濃度(pH)	24, 28
ストレート(原水)	27, 29
赤外線送信部	17, 19, 26
操作パネル	27

た行

通水路洗浄剤	39, 62
つづけるボタン・ランプ	26, 27, 33
電解槽寿命	49, 59
電解強さボタン	25, 27, 36
電極洗浄中ランプ	27, 35
電池を交換する	17
吐水口	9, 27, 30

は行

排水ホース	9, 19, 21, 26, 30
パイプクリーニング	35
表示部(液晶表示)	27, 31
フィルター	13, 14, 16, 40, 41, 63
ブザーの音量	34
別売品	62~64
ホース固定バンド	9, 21, 26
本体洗浄用カートリッジ	39, 62

ま行

水切換レバー	9, 26, 27, 29
●取り付けかた	13~16
●お手入れ	38, 40
●取りはずすとき	47

ら行

リセットボタン	27, 45
リモコン赤外線受信部	27, 38
リモコンのチャンネル設定	46
リモコンの動作確認	17, 19
リモコン部	9, 17, 26, 29, 38

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!



<http://club.panasonic.jp/>



<http://mobile.club.panasonic.jp/>



※ご愛用者登録には、
CLUB Panasonic 会員への
登録が必要です。
※登録時は、商品の品番を
事前にご確認ください。
※このサービスは
WEB 限定のサービスです。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「530#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル
06-6907-1187  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のアルカリイオン整水器の点検を!



こんな症状
ありませんか

- 電源プラグを差し込んでも何も表示しない
- 異常表示(U21~U30)を表示し、処置を行っても再度異常表示が出る
- 異常表示(H31~H38)が出る
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

故障や事故の防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Corporation 2008